



DEZENFEKSİYON, HİJYEN VE BAKIM İÇİN EKSİKSİZ ÜRÜN GRUBU



DR. SCHUMACHER

HIJYENDE KALİTE VE BULUŞ

28 yıldan bu yana çalışanları ve hastaları, enfeksiyon ve kontaminasyondan korumaya çalıştık.

TECRÜBE VASITASIYLA GÜVENLİK

Dr Schumacher GmbH Şirketi, Kassel'in 30 kilometre güneyinde Melsungen'de 1978 yılında kurulmuştur. Kurucusu Dr. Henning Schumacher'in profesyonel geçmişi nedeniyle, şirket hijyen ve dezenfeksiyon konusunda 28 yıldan fazla bir tecrübeye sahiptir.

Dr. Schumacher kimyagerlik kariyerine Hamburg'taki tanınmış bir dezenfektan üreticisinin Araştırma ve Geliştirme bölümünde başlamıştır. Araştırma ve Geliştirme bölümündeki birkaç yıllık başarılı bir çalışmadan sonra, Hesse'nin kuzey kısmında bulunan büyük bir Alman Tıbbi Malzeme Üreticisinin teklifini kabul etmiştir.

Kafasındaki esas hedefe "kişileri ve hastaları daima koru" hedefine sahip olmuş ve kendi şirketini kurmuştur. Bu yol karar verme sürecini kısaltan ve bürokratik yapının basitleştirilmesini içeren yaratıcı düşüncelerini gerçekleştirmenin tek yolu idi.

90'lı yılların sonunda şirketini babalarının şirket felsefesini taşıyan oğulları Dierk (kimyager) ve Jens (eczacı)'e teslim etti. Yenilikçi ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi de her iki oğul için şirket stratejisinin esası oldu.

YOĞUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Sürekli araştırma ve geliştirme ile aldehit ihtiva etmeyen dezenfektanlar alanında en önemli Alman imalatçılarından birisi olduk. 1980'li yılların başında, aldehit ve fenol ihtiva etmeyen ilk yüksek etkili yüzey dezenfektanını piyasaya sürdük.

Bunu, kısa bir süre sonra, DGHM (Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği) yönetmelikleri ile uyum içinde olan ve tüberküloz bakterisine karşı geniş ölçüde etkili olan aldehit ve fenol ihtiva etmeyen ilk alet dezenfektanı takip etti.

Ayrıca, daldırma yönteminde kullanılan yeni nesil alet dezenfektanlarımız ile açık bir işaret vermiş bulunmaktayız. Ağırlaştırılmış DGHM/VAH yönetmeliklerine rağmen, aldehitler kullanılmadan, aktif maddelerin miktarının azaltılmasının ve etki sürelerinin kısılmasının mümkün olduğunu ispatladık.

STORZ, OLYMPUS-WINTER & IBE, WOLF
tarafından test edilmiştir.

PERFEKTAN® ENDO

- ✓ geniş spektrumlu virüs etkinliği
- ✓ aldehitsiz
- ✓ fenolsüz

CE 0482

aletler ve endoskoplar için daldırma yöntemiyle alet dezenfektanı

- iyi temizleme özellikleri ile aldehitsiz preparat
- tüm materyallere karşı hassas - endoskopların yeniden kullanıma hazırlanması için uygundur
- geniş ekti spektrumu



Aldehitsiz ve fenolsüz tüm materyallere karşı hassas alet dezenfektanıdır. Güçlü temizleme özelliğine sahiptir. Korozyon inhibitörleri içerir. Ultrasonik banyolar için uygundur. Endoskopların yeniden kullanıma hazırlanması için uygundur. Storz, Olympus, Winter & Ibe ve Wolf tarafından endoskoplar için kullanımı tavsiye edilir.

Mükemmel temizleme özellikleri ile tek adımda temizlik ve dezenfeksiyonu mümkün kılmaktadır. Bu yüzden aldehitsiz formülüyle PERFEKTAN ENDO proteinleri sabitlemez ve bu nedenle endoskopların yeniden kullanıma hazırlanması için RKI (Robert Koch Institute) tarafından tavsiye edilmiştir. Personel güvenliğine karşı aletler kullanımdan sonra hemen ön temizleme yapmadan dezenfekte edilebilir.

Perfektan Endo çalışma güvenliği açısından, insan sağlığı ile ilgili hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili belirlemelere uygundur. (TRGS 525/540).

KULLANIM KONSANTRASYONU/ETKİ SÜRESİ

DGHM/VAH'a göre Bakterisid (MRSA dahil), fungusid (C.albicans),Levurosid	
%1	60 dakika
%2	30 dakika
%3	15 dakika
Mycobacterium Tuberculosis	
%1	60 dakika
%2	30 dakika
%3	15 dakika
Ultrasonik banyo	
%1	5 dakika
Zarflı virüslere karşı etkinlik	
Hepatit B/ HIV/HCV/Vaccinia/BVDV	
%1	30 dakika
%2	15 dakika
%4	30 dakika
Adeno virüs	
%1	60 dakika
%2	30 dakika
Papova /Polyoma virüs	
%1	60 dakika
%2	30 dakika
Polio virüs(50°C)	
%1	10 dakika
Sporosid etkinlik	
%3	2 saat

KULLANIM ALANLARI

- her türlü tıbbi aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu
- flexible ve rijid endoskopların temizlik ve dezenfeksiyonu

BİRİM AMBALAJ SEVKİYAT BİRİMİ

1 L	dozaj şişesi	12
2 L	şişe	6
5 L	bidon	3

ENDEX

- ✓ geniş spektrumlu virüs etkinliği
- ✓ aldehitsiz, fenolsüz
- ✓ kullanıma hazır

aletler ve endoskoplar için daldırma yöntemiyle alet dezenfektanı

- aldehitsiz, fenolsüz, formaldehitsiz preparat
- tüm materyallere karşı hassas- endoskopların yeniden kullanıma hazırlanması için uygundur
- kullanıma hazır

CE 0482



Endex, tıbbi aletlerin manuel olarak dezenfeksiyonunu sağlayan, kullanıma hazır bir preparattır. Aldehit ve fenol içermemektedir. Korozyon önleyicileri sayesinde materyalleri korur. Çözelti, rahatsız edici kokusu olmamasından dolayı kullanıcı açısından kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Aynı zamanda temizliği de sağlayan kısa süreli dezenfeksiyon içindir. Özellikle tüm endoskoplar (Flexible, bükülmez), termolabil, termostabil tıbbi aletler ve materyaller içindir. Tüm sirkülasyon işlemlerinde ve ultrasonik banyolarda kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

- her türlü tıbbi aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu
- flexible ve rijid endoskopların temizlik ve dezenfeksiyonu

BİRİM AMBALAJ SEVKİYAT BİRİMİ

5 L	bidon	3
-----	-------	---

KULLANIM KONSANTRASYONU/ETKİ SÜRESİ

Bakterisid (Tbc, MRSA dahil), fungusid, virüs (Hepatit B/HIV/HCV/Vaccinia virüs/BVDV/Adeno virüs/Papova/Polyoma virüs, Polio virüs(50°C) dahil)	15 dakika
Sporosid etkinlik	2 saat

DESCOTON® %2 GDA

aletler ve endoskoplar için daldırma yöntemiyle alet dezenfektanı

- ✓ formaldehitsiz
- ✓ fenolsüz
- ✓ kullanıma hazır

CE 0482



- formaldehitsiz preparat
- tüm materyallere karşı hassas- endoskopların yeniden hazırlanması için uygundur
- kullanıma hazır

Formaldehitsiz ve fenolsüz, tüm materyallere karşı hassas kullanıma hazır alet dezenfektanıdır.

%2 Glutardialdehit temeline dayanır.

Korozyon inhibitörleri içerir. Hızlı etkilidir.

Endoskopların yeniden kullanıma hazırlanması için uygundur.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
■ her türlü tıbbi aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu	2 L şişe	6
■ flexible ve rijid endoskopların temizlik ve dezenfeksiyonu	5 L bidon	3

ETKİ SÜRESİ

Bakterisid (MRSA dahil),
fungusid etki, 5 dakika
Mycobacterium Tuberculosis 5 dakika

Zarflı virüslere karşı etkinlik Hepatit B
virüs/HIV/Hepatit C virüs/
Vaccinia virüs/BVDV 30 saniye
Sporosid etkinlik 1 saat

PERFEKTAN® PAA

Komponent ve aktivator temeline dayanan konsantre Manuel alet dezenfeksiyonu için konsantre sıvı

- rijid ve fleksible endoskoplar için
- hızlı etkinlik
- geniş spektrumlu etki



PERFEKTAN PAA her türlü cerrahi aletin kullanımında ve manuel alet dezenfeksiyonu için oldukça etkili konsantre bir üründür. PERFEKTAN PAA kullanımı kolaydır, çünkü iki bileşenli çözeltisi anında etkinliğe izin verir ve toz bazlı ürünlerle çalışırken kaybedilen zaman kaybını önler.

PERFEKTAN PAA temel bileşenlerle kombinasyon halinde olan sıvı perasetik asit etkinliği sayesinde oldukça yüksek etkiye sahiptir.

Yüksek organik kirlilik olduğunda bile PERFEKTAN PAA, kullanıcı tarafından maksimum etkinliğin ve hızlı etki süresinin talep edildiği her durumda alet dezenfeksiyonu için uygundur.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
■ her türlü tıbbi aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu	2x100 ml	4x2
■ flexible ve rijid endoskopların temizlik ve dezenfeksiyonu		

ETKİ SÜRESİ

Bakterisid ,EN 13727'e göre;	%0,5	1 dakika
EN 14561'e göre;	%1	1 dakika
Yeastisidal , EN 13624'e göre;	%0,5	5 dakika
EN 14562'e göre;	%1	1 dakika
Tüberkülosid, En 14348'e göre;	%0,5	5 dakika
EN 14563'e göre;	%2	5 dakika
	%1	30 dakika
EN 14563'e göre;	%2	1 dakika
	%1	5 dakika
Mycobakterisid, EN 14838'e göre;	%2	5 dakika
	%1	60 dakika
EN 14563'e göre	%2	1 dakika
	%1	5 dakika
Sporosid EN 13704'e göre;	%2	5 dakika
	%1	30 dakika

PERFEKTAN® ACTIVE

Perasetik asit temeline dayanan, alet dezenfeksiyonu için konsantré toz

CE 0482



- RKI/DVV'ye göre virüsidal
- genişmateryal uyumluluđu
- olađanüstü temizleme performansı
- tamamen çözülebilir

PERFEKTAN active her tipteki medical cihaz için oldukça etkili konsantré toz dezenfektandır. Bu ürün güvenilir ve güvenli bir uygulama için suda hızlı ve kolay çözünen düşük tozlanma özelliđine sahip bir pudradır.

PERFEKTAN active'in aktif maddesi hafif alkali çözeltisi içinde üretilen perasetik asite dayanır. Bu ürün mükemmel antimikrobiyal özellikleri ve üstün malzeme uyumluluđu birleřtirir.

PERFEKTAN active'in kullanımı protein fiksasyonunu önler ve zor kořullarda bile güvenli dezenfeksiyon sađlar.

PERFEKTAN active zorlu temizleme kořullarının üstesinden gelir.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
<ul style="list-style-type: none"> ■ her türlü tıbbi aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu ■ flexible ve rijid endoskopların temizlik ve dezenfeksiyonu 	1 kg bidon 40 gr pořet	6 100

ETKİ SÜRESİ		
Bakterisid ,EN 1040'a göre;	%0,5	1 dakika
EN 13727'e göre;	%1	1 dakika
EN 14561'e göre;	%0,5	1 dakika
Yeastisid , EN 1275'e göre;	%0,5	1 dakika
EN 13624'e göre;	%1	1 dakika
EN 14562'e göre;	%0,5	1 dakika
Fungusid EN 1275'e göre;	%1,5	15 dakika
EN 13624'e göre;	%2	15 dakika
	%1,5	30 dakika
	%1	60 dakika
EN 14562'e göre;	%1,5	30 dakika
	%1	60 dakika
Tüberkülosid, En 14348'e göre;	%2	30 dakika
	%1	60 dakika
EN 14563'e göre;	%1,5	30 dakika
	%1	60 dakika
Sporosid EN 13704'e göre;	%2	15 dakika
	%1	30 dakika
	%0,5	60 dakika

THERMOTON® CLEAR

durulama ve parlatma solüsyonu

- sitrik asit temeline dayanır
- tüm materyallerin lekesez kuruluğunu sağlar
- korozyon inhibitörleri içerir



CE



Likit, sitrik asit esasına dayanan, biyolojik olarak indirgenebilen durulama solüsyonudur. Alkali temizleyicilerin uygulanmasından sonra nötralizör olarak kullanılacaksa yüksek konsantrasyon değerlerinde uygulanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU
■ otomatik yıkama makinelerinde aletlerin kemotermal olarak kullanıma hazırlanması için nötralize durulama ajanı	5 L bidon	3	Durulama ajanı olarak 0,1-0,5 ml/L Nötralizör olarak 1-3 ml/L

THERMOTON® CLEANER

alkali alet temizleyici

- ✓ fosfatsız
- ✓ mükemmel temizleme özelliği

- prionlara karşı profilaksis için RKI tavsiyelerine göre pH>10
- az köpürme özelliği
- korozyon inhibitörü içerir



CE



Alkaliye dayanıklı her türlü tıbbi aletlerin kemotermal olarak yeniden kullanıma hazırlanması için likit, alkali temizleyicidir.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU
■ 93°C'de otomatik yıkama makinelerinde alkaliye dayanıklı aletlerin kemotermal temizliği için	5 L bidon	3	organik yük seviyesine göre % 0,3-0,7

THERMOTON® N

otomatik yıkama makineleri için nötralizasyon solüsyonu

- fosforik asit temeline dayanır
- kireç oluşumunu engeller
- korozyon inhibitörleri içerir



CE



THERMOTON N likittir. Alkali temizleyicilerin uygulanmasından sonra asit nötralizör olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU
■ otomatik yıkama makinelerinde aletlerin kemotermal olarak kullanıma hazırlanması için nötralize durulama ajanı	5 L bidon	3	Nötralizör olarak 1-3 ml/L

DESCOSUC

dental aspiratör sistemleri için dezenfektan

- iyi temizleme özelliği
- az köpürme özelliği
- aspiratör sistemleri için optimum materyal koruması

- ✓ aldehitsiz
- ✓ fenolsüz

CE 0482



Her türlü dental aspiratör sistemlerinin çok hassas temizlik ve dezenfeksiyonu içindir. Aldehit ve fenol içermez. Aktif klor içermez ve bu nedenle entegre edilmiş amalgam separatorleri ile aspiratör sistemleri için uygundur. Zira civanın tehlikeli bir şekilde remobilize olmasına engel olur.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU/ETKİ SÜRESİ
<ul style="list-style-type: none"> ■ entegre edilmiş amalgam separatorleri olsun ya da olmasın dental aspiratör sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu 	2 L şişe 5 L bidon	6 3	DGHM/VAH'a göre, bakterisid (MRSA dahil), fungusid (C.albicans), levurosid %2 15 dakika Mycobacterium tuberculosis %2 15 dakika Zarflı virüslere karşı etkinlik Hepatit B virüs/ HIV /Hepatit C virüs/Vaccinia virüs/ BVDV %2 10 dakika

DESCO DRILL

frezler ve aeratör başlıklar için kullanıma hazır dezenfektan

- korozyon inhibitörleri içerir
- ultrasonik banyolarda kullanım için uygundur
- tüm materyallere karşı çok hassastır

- ✓ aldehitsiz
- ✓ fenolsüz

CE 0482



Frezler yanında diğer döner aletlerin daldırma yöntemiyle temizlik ve dezenfeksiyonu için, aldehitsiz ve fenolsüz, kullanıma hazır solüsyondur. Özellikle materyal uyumluluğu nedeniyle alüminyum, zımpara taşı ve plastikten yapılmış frezler için uygundur.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	ETKİ SÜRESİ
<ul style="list-style-type: none"> ■ frez uçlarının, kauçuktan olan parlaticılar, elmas düzenleyiciler, seramik düzenleyici parçalar, kök doldurucuları ve arkansas taşının temizlik ve dezenfeksiyonu için 	2 L bidon 5 L bidon	6 3	Bakterisid (MRSA dahil)/ fungusid (C.albicans)/levurosid 15 dakika Tüberkulosid 15 dakika Vaccinia/Hepatit B virüs/ HIV virüsleri 5 dakika BVDV/Hepatit C virüs 1 dakika Papova/Polyoma/Adeno virüsleri 30 dakika Polio virüsleri 50°C de 10 dakika

PLURAZYME® extra

Cerrahi Aletler ve Endoskoplar İçin Üç Enzimli Temizleyici

- çok etkili güçlü temizleme gücü
- ekonomik kullanım için konsantre ürün
- ultrasonik temizlik için ideal
- mükemmel malzeme uyumluluğu

PLURAZYME® extra mükemmel malzeme uyumluluğu vardır ve bu sebeple cerrahi aletlerin endoskopların manuel temizliği için ideal konsantre üründür. Kullanım da ekonomiktir ve ultrasonik banyolarda kullanımı tavsiye edilir.

PLURAZYME® extra yüzey aktif noniyonik surfaktanlar ve stabilize edilmiş üçlü enzim kompleksi kombinasyonundan dolayı mükemmel temizlik performansına sahiptir. Etkili formülü ulaşılması güç alanlarda dahi protein,koagüle olmuş kan,mukus,kusmuk,yağ ve dışkı gibi her tipteki organik kirlilikleri etkisiz hale getirir, nüfuz eder ve etkili biçimde uzaklaştırır.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU/ETKİ SÜRESİ	
■ aletlerin ve endoskopların temizliği	1 L şişe 5 L bidon	12 3	%0,25	5 dakika



CE

INSTRU PLUS

aletler ve endoskoplar için likit temizleyici

- ✓ pH nötr
- ✓ fosfatsız

- tüm materyallere karşı çok hassas – özellikle endoskoplar için uygundur
- alet dezenfeksiyonu için ek temizleyici
- tüm alet dezenfektanları ile uyumludur

Flexible ve rijid endoskopların, her türlü tıbbi aletlerin güçlü temizliği için materyale karşı hassas preparattır. RKI tavsiyelerine göre flexible endoskopların temizliği için pH'ı nötr ve aldehidsiz tensid temeline dayanan temizleyici INSTRU PLUS dir.

INSTRU PLUS Pentax'ın listesindedir.

Üstelik bu preparat alet dezenfektanları PERFEKTAN ENDO, DESCOTON %2 GDA VE DESCOTON EXTRA ile birlikte mükemmel bir ek temizleyici olarak kullanılabilir.

Bu preparat mükemmel materyal uyumludur ve korozyon inhibitörleri içerir. Bu nedenle metal, sentetik materyal, seramik, cam, plastik ve porselenden yapılmış her türlü tıbbi aletler için uygundur.

Ultrasonik banyoların temizliği için uygundur.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU/ETKİ SÜRESİ	
■ her türlü tıbbi aletlerin temizliğinde	2 L şişe 5 L bidon	6 3	Biyolojik yük seviyesine bağlı olarak %1 - %5 15-60 dakika	
■ flexible ve rijid endoskopların temizliğinde			Endoskopların temizliği için %2 - %5 15 dakika	



CE

DESCO CLEANER

daldırma yöntemiyle alet temizleyici - toz

- güçlü temizleme özellikleri ile göze çarpar
- ultrasonik banyoların temizliği için uygundur
- hızlı etkinlik gösterir

Metal, sentetik materyal, seramikler, cam ve porselenden yapılmış alkaliye dayanıklı aletler ve cihazlar için alkali özelliğe, güçlü ve hızlı temizleyicidir. Aletlerin yoğun protein ve kan ile kirlenmesi durumunda ,tüm medikal alanlar ve laboratuvarlar için ideal toz temizleyicidir. Ultrasonik banyolar ile temizlik için uygundur.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU
■ alkaliye dayanıklı her türlü tıbbi aletlerin temizliği için	1 kg kutu 5 kg kutu	6 1	Biyolojik yüke göre değişir.



CE



SPEZIAL ÖLSPRAY

aletler için bakım spreyi

Toksikolojik

✓ kloroflorokarbon içermez

CE

- toksikolojik olarak zararsız tıbbi beyaz yağ esasına dayanır
- buhar sterilizasyonu öncesinde alet bakımı için uygundur
- hareketli alet parçalarının optimal yağlanmasını sağlar

Toksikolojik olarak zararsız tıbbi beyaz yağ esasına dayanan, aletler için bakım spreysidir. Buhar sterilizasyonundan önce koruyucu tabaka oluşturur. Turbinler, el aletleri ve rijid endoskopların muslukları gibi köşeli parçalar için uygundur.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
■ tıbbi aletler, turbinler, el aletleri ve rijid endoskopların muslukları gibi köşeli parçalar için bakım spreyi	500 ml sprej şişe	12



THERMOTON® N PAS

tıbbi aletler için pas giderici

- korozyon inhibitörü içerir
- ultrasonik banyolarda kullanıma uygundur

Tıbbi aletlerde oluşmuş pas, korozyon, kireç ve her türlü istenmeyen lekeleri yok eder ve parlaklık verir. Tıbbi aletlerin bağlantı kısımlarını işler hale getirir ve ömürlerini uzatır.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU/Etki Süresi
■ her türlü pas, korozyon, kireç ve lekeleri gidermek için	5 L bidon	3	Manuel kullanımda %10 15 dakika

CE



INSTRUMENTENMILCH

alet bakım emülsiyonu

- tıbbi silikon yağları esasına dayanır
- buhar sterilizasyonu öncesinde alet bakımı için uygundur
- hareketli alet parçalarının optimal yağlanmasını sağlar

Toksikolojik olarak zararsız tıbbi beyaz yağ esasına dayanan, aletler için bakım emülsiyonudur. Buhar sterilizasyonundan önce aletler üzerinde koruyucu tabaka oluşturur. Otomatik yıkama makinelerinde ya da daldırma banyolarında kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	KULLANIM KONSANTRASYONU
■ tıbbi aletlerin daldırma yöntemiyle ya da otomatik yıkama makinelerinde yardımcı bakım emülsiyonu	5 L bidon	3	yıkama makinelerinde kullanım 0,3 g/L manuel kullanım %3 (daldırma banyolarında)

CE





CLEANISEPT®

yüzeyle temizliği ve dezenfeksiyonu için konsantre yüzeyle dezenfektanı

- ✓ aldehitsiz
- ✓ fenolsüz

- iyi temizleme özelliği ile aldehitsiz preparat
- DVG listesindedir. Gıda alanında kullanım için uygundur
- parfüm içermez



CE 0482



Küvözler, tıbbi envanter gibi tıbbi cihazların ve her türlü yüzeyin temizlik ve dezenfeksiyonu için aldehitsiz ve fenolsüz, konsantre yüzeyle dezenfektanıdır.

Banyo küvetlerinin alkolsüz, hızlı dezenfeksiyonu için uygundur.

CLEANISEPT içerdiği mükemmel özellikleri ile gıda endüstrisi ve kantin mutfaklarında kullanılır. Düşük toksisitesi ile parfümsüz yağ çözücüdür. CLEANISEPT DVG listesindedir.

Avrupa biosid kanununa uyar.

BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	
1 L doyaj şişesi	10	
2 L şişe	6	
5 L bidon	3	
10 L bidon	1	

KULLANIM ALANLARI	
■ tıbbi cihaz yüzeylerinin dezenfeksiyonu	
■ biosid kanununa göre her türlü yüzeylerin ve tıbbi envanterin temizlik ve dezenfeksiyonu	

KULLANIM KONSANTRASYONU/ETKİ SÜRESİ

DGHM/VAH rehberine göre (yüksek organik yük altında)			
Bakterisid MRSA dahil, fungusid / levurosid etki etme süresi :			
% 7,5	(75g/L)		1 dk
% 2,5	(25g/L)		15 dk
%2	(20g/L)		30 dk
%1	(10g/L)		60 dk
TB Bacillus (M.Terrae)			
%1	(10g/L)		15 dk
(HBV/HIV/Vaccinia/HCV/BVDV / Influenza dahil tüm zarflı virüslere karşı etkilidir)			
%7,5	(75g/L)		30 sn
%2,5	(25g/L)		5 dk
%2	(20g/L)		15 dk
Papova-/Palyoma virüs :			
%2	(20g/L)		30 dk
%7,5	(75g/L)		2 dk
Rota virüs :			
%0,5	(5g/L)		30 sn
Ürünün düşük konsantrasyonlarda kullanımı;			
Bakterisid, fungusid	%0,25	(2,5 g/L)	5 dakika
HCV/BVDV	%0,5	(5 g/L)	30 saniye
Vaccinia virüs	%0,5	(5 g/L)	5 dakika



CLEANISEPT® SPRAY

alkolsüz, kullanıma hazır küvöz dezenfektanı

- ✓ aldehitsiz
- ✓ fenolsüz
- ✓ alkolsüz

CE 0482

- kokusuzdur
- toksisitesi çok düşüktür
- akrilik yüzeyler için uygundur

Tıbbi cihaz yüzeylerinin temizliğini ve dezenfeksiyonunu tek adımda gerçekleştiren, kullanıma hazır preparattır. Özellikle bebek odaları, küvözler, yoğun bakım ve reanimasyon servislerinde non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için çok uygundur. Ayrıca çok iyi yağ çözme özelliğine sahiptir.



KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ	% 7,5'LÜK CLEANISEPT SOLÜSYONUNUN ETKİ SÜRESİ
■ alkole karşı dayanıksız her türlü tıbbi cihaz yüzeyinin temizlik ve dezenfeksiyonu	1 L şişe	12	
■ bebek odaları, küvözler, yoğun bakım ve reanimasyon servislerinde non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonu	5 L bidon	3	
			DGHM/VAH'a göre Bakterisid (MRSA, Tbc dahil), fungusid, levurosid
			1 dk.
			HBV / HIV / Vaccinia virüs / HCV/BVDV/Influenza dahil tüm zarflı virüslere karşı
			30 sn.
			Papova / Polyoma virüs
			2 dk.

ULTRASOL® ACTIVE

Etkin perasetik asit temeline dayanan yüzey dezenfeksiyonu için konsantre toz

- Geniş spektrumlu etkinlik
- Üstün temizleme performansı
- Mükemmel malzeme uyumluluğu

CE 0482



Her türlü yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için yüksek etkili konsantre tozdur. ULTRASOL® active granül yapısına sahiptir ve bu nedenle dozaj basit ve güvenlidir. Hafif alkali solüsyonda doğal olarak oluşan perasetik asit aktif maddesi nedeniyle ULTRASOL®active yüksek etkinlik aralığı sağlamaktadır. Bu ürün çok iyi malzeme uyumluluğu sunarken mükemmel temizleme gücü sağlamaktadır.

ULTRASOL® active'in etkinliği, yüksek seviyelerdeki organik kirlilikte de sağlanmaktadır. Kurumuş kanı kolayca ve güvenle çıkarır. Maksimum etkinlik ve üstün temizleme performansı gereken alanlarda, dezenfeksiyon için özellikle parfüm içermeyen ve kokusuz olan bu ürün uygundur.

KULLANIM ALANLARI

- Tıbbi Cihaz Direktiflerine göre:
Non-invaziv tıbbi cihazların temizlik ve dezenfeksiyonu.
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre:
Tıbbi, endüstriyel, kamu ve özel sektörlerinde envanterin ve yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu.

BİRİM AMBALAJ

20 gr
1 kg kova

SEVKİYAT BİRİMİ

20 gr x100
1 kg x 6

ETKİ SÜRESİ

VAH' a göre	%1	5 dk
	%0,5	15 dk
RKI/DVV'ye göre	%1,5	30 dk
Polio virüs	%1,5	30 dk
Adeno virüs	%0,5	15 dk
Polyoma virüs / SV 40	%1	5 dk
	%0,5	15 dk
Vaccinia virüs	%0,25	1 dk
Sporosid	%1	30 dk

ULTRASON BAŞLIKLARININ DEZENFEKSİYONU

CLEANISEPT® WIPES

hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkolsüz mendiller

- ultrason problemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için alkolsüz mendiller
- papova virüs dahil hızlı etkinlik
- yüksek malzeme uyumluluğu

- alkolsüz
- aldehitsiz
- fenolsüz
- dermatolojik olarak test edilmiştir

CE 0482



ultrason üreticileri tarafından
dezenfeksiyon için tavsiye edilir.

SIEMENS | PHILIPS | SHIMADZU | SONOACE

Alkole hassas tıbbi cihazlar, akrilik camlar gibi diğer alkole hassas yüzeylerin yanında tıbbi envanterin hızlı dezenfeksiyonu için kullanıma hazır mendiller.

Vajinal ve karın bölgesinin muayenesinde ultrason problemlerinin dezenfeksiyonu için özellikle tavsiye edilir.



- *DVG : Alman Virolojistler Birliği
- ** DGHM : Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği
- ***VAH : Uygulamalı Hijyen Birliği
- ***ÖGHMP : Avusturya Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği

KULLANIM ALANLARI

- alkole dayanıklı tıbbi cihazlar ve ultrason problemlerinin hızlı dezenfeksiyonu
- bioside kanununa göre her türlü yüzeylerin alkolsüz hızlı dezenfeksiyonu

BİRİM AMBALAJ

1 x 12 100 mendil'lik kutu 12
1 x 12 100 mendil'lik refil 12

SEVKİYAT BİRİMİ

% 7,5'LÜK CLEANISEPT SOLÜSYONUNUN ETKİ SÜRESİ

DGHM/VAH'a göre Bakterisid (MRSA, Tbc dahil), fungusid	1 dakika
Zarflı virüslere karşı etkinlik (Hepatit B/HIV/Hepatit C /Vaccinia virüs/BVDV Rota virüs Papova/Polyoma	30 saniye 30 saniye 2 dakika



DESCOCEPT® AF

alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı

- hoş kokusu ile aldehitsiz hızlı yüzey dezenfektanı
- noro virüs dahil geniş spektrumlu virüs etkinliği
- cilt tarafından çok iyi tolere edilir

- ✓ dermatolojik olarak test edilmiştir
- ✓ aldehitsiz
- ✓ fenolsüz

CE 0482



Alkole dayanıklı, non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin (muayene masaları, ameliyat masaları, ameliyat lamba sistemleri, hasta yatakları, sedyeler vb.) dezenfeksiyonu için alkol bazlı, kullanıma hazır yüzey dezenfektanıdır. Özellikle ulaşılması zor yüzeylerde ve hızlı dezenfeksiyonun gerekli olduğu alanlar için uygundur. DESCOCEPT AF aldehitsiz, fenolsüz ve hoş kokuludur. İyi cilt toleransı olduğu dermatolojik olarak kanıtlanmıştır.

Geniş spektrumlu virüs etkinliğine sahiptir. Noro/norwalk-like virüs dahil.

KULLANIM ALANLARI
■ non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin temizliği ve dezenfeksiyonu

BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
1 L şişe	12
5 L bidon	3
10 L bidon	1

ETKİ SÜRESİ	
DGHM/VAH/prEN 13697'e göre Bakterisid (MRSA dahil), fungusid	1 dakika
Mycobacterium Tuberculosis	1 dakika
Zarflı virüslere karşı etkinlik (Hepatit B/HIV/Hepatit C Vaccinia virüs/BVDV (RKI tavsiyelerine göre virüsidal etkinlik limiti)	30 saniye
Rota virüs	1 dakika
Adeno virüs	1 dakika
Noro/norwalk-like virüs	5 dakika

DESCOCEPT® AF WIPES

hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkol bazlı mendiller

- hızlı yüzey dezenfeksiyonu için, hoş kokulu, aldehitsiz mendiller
- noro virüs dahil geniş spektrumlu virüs etkinliği
- cilt tarafından çok iyi tolere edilir

- ✓ dermatolojik olarak test edilmiştir
- ✓ aldehitsiz
- ✓ fenolsüz

Alkole dayanıklı non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin (muayene masaları, ameliyat masaları, ameliyat lamba sistemleri, hasta yatakları, sedyeler vb.) dezenfeksiyonu için alkol bazlı, kullanıma hazır yüzey dezenfeksiyon mendilleridir.



CE 0482



KULLANIM ALANLARI	
■ alkole dayanıklı non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonu	

BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
1 x 120'lik kutu	12
1 x 120'lik refill	12

ETKİ SÜRESİ	
DGHM/VAH/prEN 13697'e göre Bakterisid (MRSA dahil), fungusid	1 dk
Mycobacterium Tuberculosis	1 dk
Zarflı virüslere karşı etkinlik (Hepatit B/HIV/Hepatit C/ Vaccinia virüs/BVDV	30 sn.
Rota virüs	1 dk.
Adeno virüs	1 dk.
Noro virüs (MNV)	5 dk.

DESCOMED®

cilt temizleme köpüğü

- ✓ Kloroflorokarbon içermez
- ✓ D-Panthenol ve Allantoin içerir

- su ve sabun kullanmadan hassas temizlik
- çok hassas ciltler için
- koku giderici etki



Yıpranmış, hassas ya da önceden zarar görmüş ciltler için yumuşak temizleme köpüğüdür. Cilt tarafından çok iyi tolere edilir.

Yatan hastaların, idrarını tutamayan hastaların ve anüs pretearlı hastaların hızlı ve kolay cilt temizliğinde kullanılır.

Descomed içerdiği yüksek kaliteli, küçük molekülü allantoin ve D-Panthenol sayesinde cildi nemlendirir ve yeniden canlanmasını sağlar.

Koku giderme özelliğine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
■ Yıpranmış, hassas ya da önceden zarar görmüş ciltlerin hızlı temizliğinde kullanılır	500 ml sprey	12
	5 L bidon	3
	200 ml PE, yeniden doldurulabilir, boş şişe	30

EL DEZENFEKSİYONU

HİJYENİK EL DEZENFEKSİYONU

- ▶ kuru ellere yeterli miktarda el dezenfektanı alınır.
- ▶ aşağıda yer alan 6 adım takip edilir. Her bir adım 5 kez tekrarlanır.
- ▶ tüm etki süresi boyunca cilt nemli tutulur
- ▶ hijyenik el dezenfeksiyonu sağlamak için en az 30 sn gereklidir



SEPTODERM® HÄNDE

alkol bazlı el dezenfektanı

- mükemmel cilt toleransı
- ciltte uzun süre kalıcı aktif madde içermez
- geri yağlandırıcı maddeler içerir

Yüksek kaliteli geri yağlandırıcı madde içeriği ile alkol bazlı el dezenfektanıdır.

Cilt üzerinde uzun süreli biriken aktif maddeler içermediği için, tahriş ya da hassasiyet oluşturabilecek ciltler için özellikle uygundur. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Virüsler üzerinde etkinlik;

Hepatit C / HIV / Hepatit B gibi zarflı virüslere karşı hızla etki eder. Noro/norwalk-like, Vaccinia ve Rota virüslere karşı da etkilidir. Tüm yıkama losyonlarıyla uyumludur. Aldehit, fenol ve kuarterner amonyum bileşikleri içermez. Sporsuz filtre edilmiştir.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
■ hijyenik el dezenfeksiyonu	150 ml şişe	20
■ cerrahi el dezenfeksiyonu	500 ml şişe	20
	1 L şişe	12
	5L bidon	3

- ✓ cilt tarafından çok iyi tolere edilir
- ✓ dermatolojik olarak test edilmiştir
- ✓ Noro/norwalk-like virüslere karşı etkili



ETKİ SÜRESİ

Hijyenik el dezenfeksiyonu DGHM/VAH/EN1500'e göre	30 sn
Cerrahi el dezenfeksiyonu DGHM/VAH/EN12791'e göre	1,5 dk
Bakterisid (MRSA dahil) Fungusid DGHM/VAH'a göre	30 sn
Tb bakteri (M. Terrae)	1 dk
Zarflı virüslere karşı etkinlik Hepatit B / HIV / Hepatit C / Vaccinia virüs / BVDV	15 sn
Rota virüs	15 sn
Noro virüs EN 14476'ya göre (Murine noro virüs, MNV)	1 dk

ASEPTOMAN® %72

alkol bazlı el dezenfektanı

- günlük hijyenik rutin için etil alkol esasına dayanır.
- noro virüs'e karşı hızlı etkinlik
- cilde karşı hassas

Aseptoman® %72 etil alkol bazlı, cilde ovularak uygulanan, kullanıma hazır el dezenfektanıdır. Günlük hijyenik el dezenfeksiyonu için uygundur. Aseptoman® %72 etkinliği tıp sektörü için son EN standartlarını karşılamaktadır. En standartlarına göre bakterisidal, tüberkülosidal bunun yanında zarflı virüslere ve Noro virüslere karşı etkilidir. Bu ileri düzey formülasyon dermatolojik olarak test edilmiştir ve hassas ciltler için uygundur. Aseptoman® %72 cilt bakımı için nemlendirici içerir ve hoş taze bir koku sunar.

KULLANIM ALANLARI	BİRİM AMBALAJ	SEVKİYAT BİRİMİ
■ hijyenik el dezenfeksiyonu	150 ml şişe	20
■ cerrahi el dezenfeksiyonu	500 ml şişe	20
	1 L şişe	12
	5L bidon	3

ETKİ SÜRESİ

Hijyenik el dezenfeksiyonu EN1500'e göre	30 sn
Bakterisid (MRSA dahil), Yeastisidal (candida albicans)	30 sn
Cerrahi el dezenfeksiyonu EN 12791'e göre	3 dk.
Tüberkülosid (M.terrae)	30 sn
Zarflı virüslere karşı etkinlik Hepatit B/HIV/Hepatit C / Vaccinia virüs/BVDV	15 sn
Noro/norwalk-like virüs	15 sn





DUVARA MONTE EDİLEBİLEN DOZAJLAMA TERTİBATLARI

AK 500/AK 1000

- Alüminyum kasa ve paslanmaz çelikten basma kumlu dozaj yardımcısıdır. 500 ml veya 1000 ml için plastik pompalı ve istenildiğinde kilitlenebilen kapak başlıklı şişeler için uygundur.

SP 500/SP 1000

- Plastik kasa ve basma kumlu dozaj yardımcısıdır. 500 ml veya 1000 ml için plastik pompalı ve istenildiğinde kilitlenebilen kapak başlıklı şişeler için uygundur.

KROM DİSPENSER

- Kromdan imal edilmiş, basma kumlu dozaj yardımcısıdır. 1000 ml ambalaj için plastik pompalı ve istenildiğinde kilitlenebilen kapak başlıklı şişeler için uygundur.

DEZENFEKSİYON KÜVETİ

- 4 ve 10 lt'lik dezenfeksiyon küvetleri

DOZAJLAMA APARATLARI

- 1 Litre dozaj şişesi (60 ml hazneli)
- 2 Litre şişe, 5 ya da 10 litre bidonlar için dozajlama pompası
- 2 Litre şişe, 5 veya 10 litre bidonlar için musluk
- 500 ml ve 1000 ml şişeler için dispenser
- Sprey başlık



BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?



Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dr. Trippen GmbH joint venture kuruluşudur.

DESOMED EURO
KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İbni Melek Mah. OSB 5.Yol No: 42
Tire - İzmir / TÜRKİYE

Tel : (+90 232) 853 97 17
(+90 232) 513 50 05
Fax : (+90 232) 853 94 87

Internet:
www.desomedeuro.com
E-mail:
info@desomedeuro.com



DR. SCHUMACHER GMBH

Postfach 11 62
D-34201 Melsungen
Almanya

Tel.: (+49) 56 64 / 94 96-0
Fax: (+49) 56 64 / 84 44

Internet:
www.schumacher-online.com
E-mail:
post@schumacher-online.com

*lütfeñ internet sayfamızı ziyaret ediniz
www.desomedeuro.com
tüm ürünlerimizin data sheetlerini
bulabilirsiniz.*

HİZMETLERİMİZ

- ▶ Rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler
- ▶ Müşterilerimiz ve kullanıcıların danışmanlığı ve eğitimi
- ▶ Aletlerin otomatik yıkama makinelerinde yeniden kullanıma hazırlanması yanında otomatik dozajlama makineleri için teknik destek
- ▶ Hijyen Yönetimi (hijyen ve dezenfeksiyon planları)