



Health Industry Inc. / Sađlık Endüstri A.S.

TR | 2024 - 2025

Medoffice Sağlık Endüstri A.Ş.


Medoffice Sağlık Endüstri A.Ş. olarak; 4000 m2'lik üretim tesisimizde, deneyimli teknik kadromuz, otomatik makine parkurlarımız ve tam donanımlı mikrobiyoloji laboratuvarımız ile daha kaliteli ürünler için canla başla çalışmaya devam etmekteyiz! Türkiye'de 80'in üzerinde bayiimiz bulunmakta ve 75'ten fazla ülkeye ihracat yapmaktayız.

Kuruluşumuzdan bu yana amacımız önleyici hasta bakım ürünleri üretmektir. Enfeksiyonu önlemek, hasta bakımını geliştirmek ve sağlık hizmetlerini geliştirmeye yardımcı olmak adına sürekli yeni yollar arıyoruz. Bu nedenle Ar-Ge Departmanımız, kavramsal fikirlerden, nihai ürünlerin imalatına, pazarlanmasına ve dağıtımına kadar sürekli olarak yeni fikirler geliştirmek için çalışmaktadır. Sloganımız; 'İnovasyon yoluyla koruma ve iyileştirme gücünü artırmak ve her gün dokunduğumuz binlerce kişiye fayda sağlamaktır!'

Sağlık Endüstrisini iyileştirmek için çalışıp, kendimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz! Bu nedenle dünyadaki bireyler ve topluluklar için kaliteli bakımı olumlu bir yönde etkiliyoruz.

Çabalarımızın başkalarının yaşamlarını doğrudan etkilediğini asla unutmuyoruz. Hasta bakımını iyileştirmek için bugün yaptığınız yatırım daha sağlıklı, mutlu ve umutlu bir yarın ile sonuçlanacaktır.

Medoffice ile daha sağlıklı yarınlarla!!!

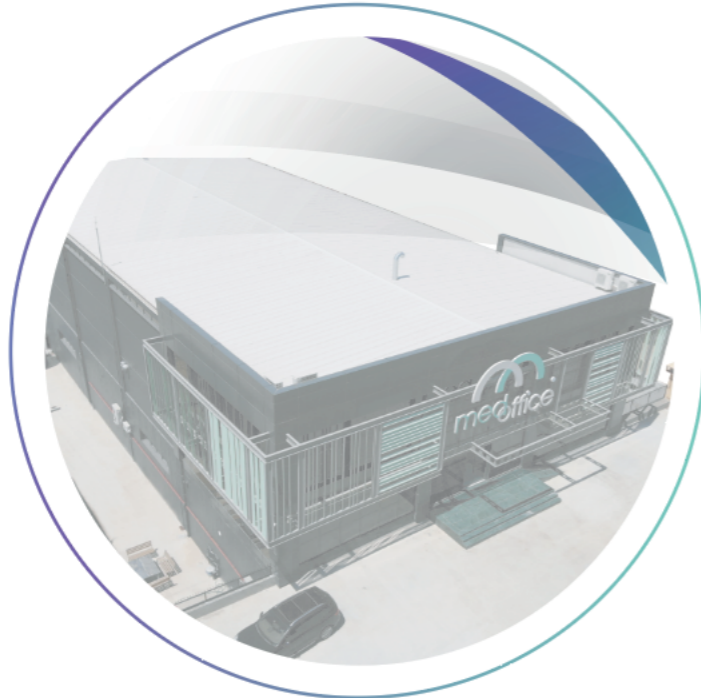

Profesyonel Yatan Hasta Bakımı / İnkontinans Bakımı

MED-COVER
comfortably recover!

Saç Yıkama Bonesi	3
Bariyer Kremli Kese	4
Bariyer Kremli Perine Pedi	5
Bariyer Kremli Ped	6
Vücut Bakım Setleri	7-8
Bariyer Krem 100gr (Çinko-Oksit)	9-10
Bariyer Krem 120gr (Şeffaf)	11-12
Bariyer Film Sprey	13-14
Topuk Koruyucu Köpük Örtü	15-16
Durulama Gerektirmeyen Vücut Temizleme Köpüğü	17-18
Pişik Önleyici Bebek Mendili	19
Ayak Bakım Kremi (Diyabetik Ayak)	20

Enfeksiyon Kontrol

mediseptik

Enfeksiyon Kontrol Ürünleri	21-22
Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusu	23
Antibakteriyel Perine Bölgesi Temizleme Havlusu	24
Antibakteriyel Saç Yıkama Bonesi	25
Antibakteriyel Vücut Temizleme Kesesi	26

Enfeksiyon Kontrol

HiCLO

El ve Cilt Dezenfektanı	28
Antibakteriyel Durulama Gerektirmeyen Yıkama Solüsyonu	28
Yara Yıkama Solüsyonu	29

Hijyenik Bakım Ürünleri

as

Hijyenik Saç Yıkama Bonesi	30
Hijyenik Perine Bölgesi ve Vücut Temizleme Havlusu	31-32

İlk Yardım Boyunluğu

MED-COVER
comfortably recover!

Yetişkin & Pediatrik Ayarlanabilir İlk Yardım Boyunluğu	33-34
---	-------

Medoffice Hakkında

medoffice

Medoffice Özel Markalı Üretim (Private Label)	35-36
Medoffice Üretim Hatları	37-38
Fabrika	39-40

Yataklak Hastalar ve Yoğun Bakım Hastaları

Basınç (Dekubitus) ülserleri hastanede yatan hastalarda ciddi oranda görülür. Yoğun bakım ünitelerindeki hastalar özellikle risk altındadır çünkü göreceli olarak hareketsizdirler. Uzun süreli basınç, kesme kuvveti, nem ve sürtünme etiyolojik faktörlerdir. Basınç ülserleri enfeksiyon ve nadiren karsinom ile komplike olabilir. Tıttiz bir cilt bakımı ve baskıyı hafifletme üzerine yoğunlaşan bir tedavi ile önlenabilir.

Bu durumları önlemek için takip edilecek bazı süreçler vardır;

-Cilt temiz ve nemli tutulmalıdır.

-Cildi kurutan ürünler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Buna birçok sabun, vücut yıkama ürünleri ve talk pudrası gibi ürünler dahildir. Cildi kurutmayan, cildin bariyer sistemini koruyan ve geliştiren temizleyiciler kullanılmalıdır.

-Bası yarası riski söz konusu olduğunda, hastanın yatış pozisyonu hemşire tarafından sık sık değiştirilmeli, hasta yemek yerken mümkünse oturtulmalı, diyet ve özenli bir cilt bakımı uygulanmalıdır.

-Hareket kabiliyeti kısıtlı hastalarda cilt bakımı, pozisyon ve diyet çok daha fazla önem arz etmektedir.



Üriner İnkontinans

Üriner İnkontinans; kontrolsüz idrar sızıntısı (kaçırma) anlamına gelir. Bu sık görülen can sıkıcı bir durumdur. Bu durum geriatrik sağlığında önemli bir problem olarak tanımlanmıştır.

İdrar İnkontinans ile İlişki Dermatitler

İnkontinansı olan bir çok insan bir şekilde inkontinansa bağlı dermatitleri tecrübe edecektir. Bu problem daha çok yaşlı yetişkinlerde görülmektedir. İnkontinans; hastanın idrar ve dışkı boşaltımını kontrol edememesi anlamına gelir. Cilt tarafından oluşturulan koruyucu bariyer hasar gördüğünde inkontinansa bağlı dermatitler oluşur. İdrar veya dışkıda bulunan bakterilere maruz kalmak, yanma kaşıntı gibi ağrılı semptomlara neden olabilir. Bu durum öncelikli olarak genital, uyluklar ve karın çevresinde ki bölgeyi etkiler. İnkontinans ilişkili dermatitler aynı zamanda perianal dermatit, irritant dermatit, nem lezyonları ve bez döküntüleri olarak adlandırabilirler, ancak oluşma şekilleri farklıdır. (Healthline, 2018)

İnkontinans İlişkili Dermatit Yaraları İçin Önlemler

Bağışıklık ile ilgili termoregülasyon işlemlerine ek olarak, cilt iç ve dış ortam arasında bir bariyer görevi görür. İç çevrede gelen sıvı ve elektrolitlerin aşırı kaybını önlerken, vücudu çevreden gelen tahriş edici veya zehirli maddelerden korur. (Gray 2010).

İnkontinans ilişkili dermatitlerin önlenmesi iki bakım prensibine dayanır; idrar veya dışkı ile deri temasından kaçınmak ve/veya inkontinansın zararlı etkilerinden korunmak amacıyla yapılan bir cilt bakım rejimi sağlamak. Yaşı ilerlemiş hastalarda ise bu bakım sıvı yönetimi, diyet veya tuvalet teknikleri gibi invaziv olmayan davranışsal hareketlerle başlar ve gerekli vakalarda farmakolojik veya cerrahi müdahalelerle ilerleyebilir.

Yapılandırılmış bir cilt bakım rejimi oluşturmak, mevcut müdahaleleri kullanarak tam kontinansı elde edemeyen kronik inkontinanslı veya sistemik bir enfeksiyon ya da başka bozukluklara bağlı akut başlangıçlı inkontinans olan kişilerde, hassas deriyi koruduğu için önemlidir. Yapılandırılmış bir cilt bakım rejimi üç ana başlıktan oluşmaktadır; cildi temizlemek, nemlendirici uygulamak ve cilt koruması sağlamak. (Beeckman, Woodward and Gray, 2011; Gray et al., 2007; Gray et al., 2012).

Daha iyi bir bakım için Med-Cover ürünleri ciltte bariyer tabaka oluşturur, yatıştırır, nemlendirir, temizler, besler, hoş koku sağlar, anti-kaşıntı ve anti-bakteriyel etki yaratır.



SAÇ YIKAMA BONESİ

Med-Cover Saç Yıkama BONESİ; ölü hücreleri saçtan uzaklaştırmak, kafa derisini ve saçları rahatlatmak ve baş çevresini temizlemek için kullanılır. Zengin içeriği ile saçta yumuşaklık verir ve saçın daha parlak görünmesini sağlar. Alantoin ile kepeğin ve ölü hücrelerin saçtan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Provitamin B5 ve Gliserin ile saçı nemlendirir ve parlatır, kafa derisini ve saçı Papatya Ekstratı ve Aloe-vera ile rahatlatır. EEG jelini, kanı, iyodu ve daha fazlasını kafadan efektif bir şekilde uzaklaştırır.

Ref: MC0030

Barkod: 8681020477960

Sınıf: Kozmetik

CPNP Referans: 2781127

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	
NONWOVEN:	120 GSM (30% VISCON +70% PES) SPUNLACE	
DIŞ NONWOVEN:	PE Film 40GSM SIVI GEÇİRMEZ	
LASTİK:	Şeffaf, Lateks içermeyen lastik.	
DIŞ AMBALAJ:	Doypack, 60 PE + 12 PET	
BİTMİŞ ÖLÇÜLER:	Component size: 50-53 cm diameter cut size	
	Açıklık	13-16cm çap
	Çap	26-28cm çap

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI
PAKET:	1 Saç yıkama BONESİ / 1 Paket
KOLİ:	75 Paket / Koli
PALET:	36 Koli / Palet
TESLİMAT SÜRESİ :	SORUNUZ

BARIYER KREMLİ KESE

Med-Cover Bariyer Kremli Kese, yataklık ve yoğun bakım hastaları için rahat ve güvenli bakım olanakları sunmaktadır.

%3 Dimetikon içeren özel formülasyon sayesinde cilde bakım yapar, yumuşatır ve bariyer tabaka oluşturur. Oluşturduğu bariyer tabaka sayesinde idrar ve gaitanın cilt ile temasını önler. İnkontinans kaynaklı dermatit ve bası yaraları oluşumunu önlemeye yardımcı olur. E vitamini ve Provitamin B5 içeriği sayesinde cildi besler.

İçerisinde bulunan Fosfolipid, su kaybına neden olan hasarlı hücrelerin su geri kazanımına yardımcı olur.

Giyilebilir kese formundaki yapısı ile kullanımı kolaydır. Petek dokusu sayesinde ölü hücreleri ve kirleri ciltten rahatça uzaklaştırır. Cildi tahriş etmeden uygulanabilir, üç boyutlu özel yumuşak kumaştan üretilmiştir. Ürün kullanımından sonra hoş bir kokuyla hastanın daha iyi hissetmesine yardımcı olur.

Ref: MCK008

Barkod: 8681020477915

Sınıf: Tıbbi Cihaz

Miktar: 8 adet/paket

Ref: MCK0010

Barkod: 8681020477953

Sınıf: Tıbbi Cihaz

Miktar: 10 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
NONWOVEN:	85 GSM (30% VISCON + 70% PES) BEYAZ PETEKLİ NONWOWEN
PAKETLEME:	Zipli Ambalaj, 60 PE + 12 PET
BİTMİŞ ÖLÇÜLER:	15cm x 22cm

PAKET DETAYLARI	PAKET / KOLİ / PALET MİKTARI
PAKET:	8 Adet / Paket
KOLİ:	70 Paket / Koli
PALET:	36 Koli / Palet
TESLİMAT SÜRESİ:	SORUNUZ



BARIYER KREMLİ PERİNE PEDI

Özellikle hasta alt bezi kullanan hastalarda, bezi değiştirildikten sonra tavsiye edilir. Perine bölgesinin sabun ve su gibi son derece bazik ürünler ile temizlenmesine bağlı olarak, bölgedeki asit tabakası (koruyucu bariyer tabakası) deforme olabilir. Asit tabakası deforme olan cilt kurur. Kuru cilt çatlak ve bu çatlaklar bölgede üreter enfeksiyon oluşması için son derece elverişli bir ortam oluşturur.

MED-COVER Bariyer Kremli Perine Pedi içeriğindeki %3 Dimetikon ile bozulmuş cildin doğal bariyer tabakası rolünü üstlenir. Bu tabaka, sıvı geçirgenliğini bloke eder. Şeffaf, nefes alabilen bir bariyer tabaka oluşturur. Perine bölgesi için özel olarak hazırlanmış olan ürün, yumuşak dokusu ile bölgeye zarar vermeyecektir. İdrar ve dışkı bölgelerindeki bakımın yanı sıra cilt hasarının önüne geçmeye yardımcı olacaktır. Fosfolipid kuru cildi nemlendirir, cilde kaybettiği esnekliğini geri kazandırır, Papatya Özü ve E Vitamini gibi özel bileşenler ile konforlu bir bakım olanağı sunar.



Ref: MCP0025

Barkod: 8681020477045

Sınıf: Tıbbi Cihaz

Miktar: 25 adet/paket

Ref: MCP0050

Barkod: 8681020477113

Sınıf: Tıbbi Cihaz

Miktar: 50 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
NONWOVEN:	50 GSM (50% VISCON +50% PES) BEYAZ SPUNLACE
PAKETLEME:	FlowPack, 60 PE + 12 PET
KATLAMA:	Z Katlama

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	
PAKET:	25 Adet / Paket	50 Adet / Paket
KOLİ:	60 Paket / Koli	30 Paket / Koli
PALET:	36 Koli / Palet	36 Koli / Palet

BARIYER KREMLİ PED

MED-COVER Bariyer Kremli Ped, özel formülasyonu sayesinde ciltte bariyer takaba oluşturur ve cildin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılar. Klinik deneyler, esneklik özelliğinden dolayı cildin nemli koşullarda bütünlüğünü daha iyi koruyabildiğini kanıtlamaktadır. Sıradan ürünler cildin elastikiyet kabiliyetini ortadan kaldırır, cildin kurummasına neden olur, ciltte çatlaklar oluşturur ve daha sonra yaralanmaya yol açar. MED-COVER Bariyer Kremli Ped içeriğinde bulunan %3 oranında Dimetikon ile cildin dış etkenlerden korunmasına yardımcı olurken bariyer koruyucu tabaka oluşturur. Aloe Vera, Vitamin E, Papatya özü ve Provitamin B5 ile cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. Aynı zamanda, içerisindeki Fosfolipid ile ciltten kaybolan suyun geri kazanılmasına yardımcı olur.



Ref: MCV0012

Barkod: 8681020477618

Sınıf: Tıbbi Cihaz

Miktar: 12 adet/paket

Ref: MCV0050

Barkod: 8681020477823

Sınıf: Tıbbi Cihaz

Miktar: 50 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
NONWOVEN:	60 GSM (50% VISCON +50% PES) BEYAZ SPUNLACE
PAKETLEME:	FlowPack, 60 PE + 12 PET
KATLAMA:	Z Katlama

PAKET DETAYLARI	PAKET / KOLİ / PALET MİKTARI	
PAKET:	12 Adet / Paket	50 Adet / Paket
KOLİ:	100 Paket / Koli	30 Paket / Koli
PALET:	36 Koli / Palet	36 Koli / Palet

8681020477618 Bariyer Kremli Ped 12'li
8681020477113 Bariyer Kremli Perine Pedi 50'li
BARKOD : 8681020477977



Vücut Bakım Seti
KP3
Vücut Bakım Seti

hepsi bir arada

- Konforlu bakım
- Yara önleyici etki
- Enfeksiyon kontrol
- SGK geri ödemesi



Vücut Bakım Seti
VP1
Vücut Bakım Seti

8681020477953 Bariyer Kremli Kese 10'lu
8681020477045 Bariyer Kremli Perine Pedi 25'li
BARKOD : 8681020477878

İSTEĞE GÖRE FARKLI İÇERİKTE SET YAPILABİLİR.

*SMT : 3916.270015.225
*Geri ödeme yoğun bakımda geçerlidir.



ÇİNKO OKSİT BARIYER KREM

Med-Cover Bariyeri Krem, idrar tutamamadan kaynaklanan, deride meydana gelebilecek dermatit oluşumunu önler. Hastanede yatan hastalarda pozisyon aldirmeden ortaya çıkabilecek tahrişleri önlemeye yardımcı olur. Yaranın kenarında meydana gelebilecek maserasyonları önler ve yara iyileşmesine katkıda bulunur. Cildi nemlendirir. Flaster ve yara örtüsünün yapışmasına engel olmaz ve deriden kolayca çıkarılmasını sağlar. Med-Cover Bariyer Krem, konsantre krem formundadır ve vücut sıvılarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

1. Yatan Hastalarda Hasta Alt bezi kullanan hastalarda basılara bağlı olarak, bası noktalarında oluşabilecek tahriş ve kızarıklıkları önleme amaçlı kullanılmaktadır.
2. Ciltte İntkontinas nedeniyle oluşabilecek "Basınç Ülseri" oluşumunu engellemek amacıyla kullanılmaktadır.
3. Yatan hastalarda pozisyon verirken oluşabilecek tahrişleri en aza indirmeye yardımcı olur.
4. Tüm yara kenarlarında oluşabilecek olan maserasyonları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Ref: MCB0010

Barkod: 8681020477809

Sınıf: Tıbbi Cihazlar

100gr/Paket

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	AĞIRLIK	EBATLAR
PAKET:	100 GR / Tüp	0,11 KG	4,5CM x 4,5CM x 15CM
KOLİ:	118 Adet / Koli	14,16 KG	39CM x 39CM x 30CM
PALET:	36 Koli / Palet	530 KG	80CM x 120CM x 195CM



ŞEFFAF BARIYER KREM

Bu mükemmel krem ile yatak yaralarının oluşumunu önüyor, mükemmel bir bariyer sağlayarak inkontinans kaynaklı hastalıkları engelliyoruz. Yaranın maserasyonunu önüyor ve yaranın iyileşmesini hızlandırıyoruz. Mükemmel ve hızlı nemlendirici etkisi sayesinde diabetik ayak vakalarında ve yanıklarda da kullanılabilir. bir bariyer görevi görür.

Ürün içeriğinde bulunan 'Beeswax' (doğal balmumu) ve 'Dimethicone' sayesinde cilt üzerinde sıvıyı geçirmeyen, şeffaf, nefes alabilen bir bariyer tabaka oluşturur ve cildi nemlendirir. Yaranın maserasyonunu önler.
-Isopropil Palmitate ve Gliserin ile cildi yumuşatır, cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırır ve cilt dokusunu yumuşatır. Ciltteki çatlak ve boşlukları doldurur. Cildi dış etkenlerden koruyan doğal bir bariyer görevi görür.
-Shea Butter ile cildi dış etkenlerden korur, nemlendirir, yumuşatır, yaranın çevresine uygulandığında ölü dokuları, Aloe-vera ve Papatya ekstraktları sayesinde cildi besler.
-Tatlı Badem Yağı sayesinde cildin nem ihtiyacını karşılayarak oluşmuş olan çatlakların giderilmesine yardımcı olur. Çatlak oluşumunu önler. Pişik ve kaşıntı olan yere sürülürse çabuk iyileşme sağlar, yanıkların iz bırakmasını önlemeye yardımcı olur, cildin daha genç ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
-İçerisinde bulunan D-panthenol uzun süren ve derine nüfus eden nemlendirici etkisi ile cildi nemli tutar, Epitelizasyonu uyarır, yara iyileştirici ve Antienamatuar etki gösterir.
-Zeytinyağı en güçlü doğal nemlendiricilerdendir. Özellikle kuru ciltler için mükemmel bir nemlendirici olan, cildi besleyen yağ asitleri açısından zengin bir yağ türüdür. Cilt döküntülerini, ciltteki kızamık ve kaşıntıyı giderir.
-İçerisinde bulunan aminoasit grupları ile ölü dokuları yeniler.

Ref: MCB0020

Barkod: 8681020477816

Sınıf: Tıbbi Cihaz

Adet: 120 gr/Paket

PAKET DETAYARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	AĞIRLIK	EBATLAR
PAKET:	120GR / Paket	0,013 KG	4,5CM x 4,5CM x 17CM
DIŞ KUTU:	96 Adet / Koli	14 KG	39CM x 39CM x 30CM
PALET:	36 Koli / Palet	524 KG	80CM x 120CM x 195CM



BARIYER FİLM SPREY

- Med-Cover cildi yakmayan bariyer film; cildi dış etkenlerden koruyan, %100 Silikon'dan oluşan cilt koruyucusudur.
- Oluşturduğu şeffaf ve nefes alabilen film tabaka sayesinde cildi uzun süre korur.
- İdrar ve dışkı deri iltihaplarında stoma, flaster ve örtü soyulmalarına karşı cildi korumak için kullanılır.
- Hassas ciltleri medikal yapışkan (flaster, yara örtüleri vs) ilişkili cilt hasarlarına karşı korur.
- Hipoallerjeniktir, biyoyumludur. Alkol içermez.
- Yanma hissi yapmaz, 72 saate kadar varan cilt koruması mevcuttur.

Ref: MCS0020

Barkod: 8683148050049

Sınıf: Tıbbi Cihazlar

50 ml

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	AĞIRLIK	EBATLAR
PAKET:	50 ml / Şişe	0,055 KG	3,5CM x 3,5CM x 12CM
KOLİ:	200 Şişe / Koli	11 KG	39CM x 39CM x 30CM
PALET:	36 Koli / Palet	396 KG	80CM x 120CM x 195CM



Kullanım Talimatı:

- 1) Açmadan önce Med-Cover Bariyer Film şişesini hasar açısından görsel olarak inceleyin. Hasarlı ürünleri kullanmayınız.
- 2) Bariyer Film uygulanmadan önce cilt temiz ve kuru olmalıdır.
- 3) Püskürtme aparatını ciltten 10-15 cm (4-6 inç) uzakta tutun ve pürüzsüz düzgün bir şekilde uygulayın. Spreyi geniş bir hareketle hareket ettirirken tüm uygulama noktasının film ile kaplanmasını sağlayın. Gözden kaçan bir alan olmuştusa ürünün o alana yeniden uygulanmasını sağlayın.
- 4) Her pansuman ve/veya yapıştırma işleminde bariyer filmin yeniden uygulanması gereklidir. Cilde uygulama yapmanın mümkün olmadığı durumlarda medikal yapıştırıcının üzerine uygulanıp kolayca çıkması sağlanabilir.
- 5) Vücut sıvılarına, dışkıya, idrara karşı koruyucu olarak kullanıldığında ve yapıştırıcı olarak kullanılmadığında ürünler cilde uygulanır.
- 6) Bariyer filmin duruma göre 24-72 saatte bir yeniden uygulanması önerilir.
- 7) Çok sık temizlik gerektiren uygulamalarda (örn: sürekli ishali dışkılama) daha sık uygulamalar gerekli olabilir.
- 8) Kullanılmadığı zaman ürünün kapağını kapatın.

Ref: MCS0010

Barkod: 8683148050032

Sınıf: Tıbbi Cihazlar

30 ml


PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	AĞIRLIK	EBATLAR
PAKET:	30 ml / Şişe	0,035 KG	3,5CM x 3,5CM x 9,3CM
KOLİ:	128 Şişe / Koli	4,5 KG	29,5CM x 29,5CM x 23CM
PALET:	48 Koli / Palet	220 KG	80CM x 120CM x 195CM

MED-COVER TOPUK KORUYUCU KÖPÜK ÖRTÜ

Topuk bölgesi, kemikli yapısından dolayı özellikle yatan hastalar için basınç ülserlerine karşı hassastır. Bu bölgede kemik çıkıntısını kaplayan ince bir cilt ve doku örtüsü bulunur. Eğer kişi hareketsizse ve başka risk faktörleri de mevcutsa, o bölgedeki dolaşım cilde uygulanan basınç nedeniyle bozulabilir. Bu yeterince uzun süre devam ederse, kırılabilir dokuya verilen lokal hasarı temsil eden bir basınç ülseri oluşabilir.

Maksimum fayda için hassas topuk bölgesindeki basıncın dengelenmesi gerekir. Bu, topuk ülserlerinin tedavisinin yanı sıra önleme için de geçerlidir.


İnsan Vücudundaki Bası Yarası Alanları

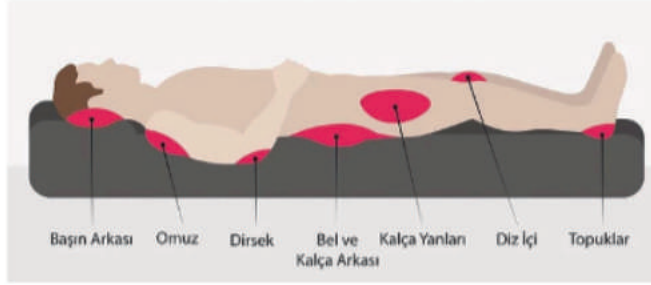

Ayrıca; Yara bakımı sonrası koruyucu olarak kullanımı da önerilmektedir.

- Ayağın anatomik şekline uygun olacak şekilde, nazikçe korumak ve mekanik destek sağlanması için ergonomik bir tasarıma sahiptir.
- Ayağı sıcak tutmak ve tüm ayağın basınç yüzeyine hafif bir uyarı vererek basıncı dağıtır.
- Uzun süredir yatalak olan hastalar veya yaşlılar; Ameliyat geçirenler, yatak istirahati ve lokal travması olanlar veya yaraları baskılanamayan hastaların kullanımı için geliştirilmiştir.

Bası Yarası Etiyolojisi

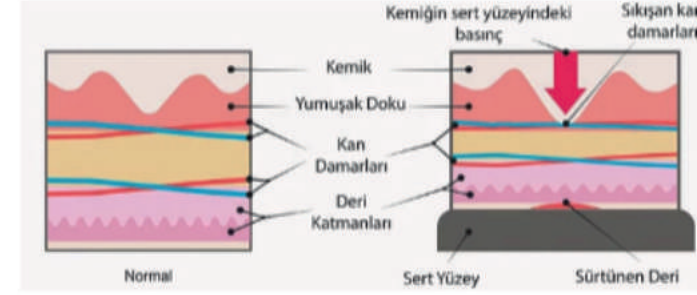

BASINÇ YARASI
KESME KUVVETİ
TOPUK SÜRTÜNMESİ

Bunlara karşı topuğu
korumaya yardımcı
olarak tasarlanmıştır.



YENİ
ÜRÜN



*Kuru Uygulama Keseli
Aerosol Vücut Temizleme Köpüğü Seti*



*Vücut Temizleme
Köpüğü - 500ml*



*Özel Fırça Başlıklı
Vücut Temizleme
Köpüğü - 200ml*



DURULAMA GEREKTİRMEYEN VÜCUT TEMİZLEME KÖPÜĞÜ

Yatalak hastalarda, yoğun bakım hastalarında, hareket kısıtlılığı olan hastalarda kullanıldığı gibi günlük vücut temizliğinde de kullanılabilir. Zengin içeriği ile profesyonel bir cilt bakımının yanı sıra temizleme etkisi de sunar. Cilt dostu pH seviyesi ile sık kullanıma uygundur. Diğer temizlik ürünlerinin aksine cildi kurutmaz, cildi besler ve pürüzsüz görünüm sağlar. İçerdiği Yulaf Özü sayesinde cildi nemlendirir ve cilt bariyerini güçlendirir, Papatya özü sayesinde cilde parlaklık ve canlılık verir.

Aloe Vera Özü ve Provitamin B5 sayesinde antioksidan etki gösterir, cildi nemlendirir, besler. Cildin en dış tabakasındaki lipidlerin sentezini artırarak cildin koruyucu / bariyer fonksiyonunun gelişmesinde rol oynar ve hücre yenilenmesini artırır. Su ve durulama gerektirmeden temizlik sağlar. Cilde ve doğaya zararlı olan gazlar ve parabenler içermez.

Kuru uygulama keseli Aerosol Köpük ile ciltte derinlemesine temizlik sağlar.

Uygulanacak bölgeye 20-30 cm mesafeden püskürttükten sonra isteğe bağlı olarak yanında verilen kuru uygulama kesesi yardımıyla dağıtarak vücut temizliği ve bakımı yapılır.

Özel fırça başlıklı versiyonu ile cildinizi yumuşatır ve gözenekleri etkin bir şekilde temizler. Uygulanacak bölgeye 20-30 cm mesafeden püskürttükten sonra özel fırça başlığı ile köpük formunda çıkan ürün dairesel hareketlerle masaj yaparak cilde uygulanır.

Ref: MCBF002
Ref: MCBF003

Barkod: 8681020477939
Barkod: 8683148050476

Sınıf: Kozmetik
Sınıf: Kozmetik

Miktar: 200ml
Miktar: 500ml

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	EBATLAR
PAKET:	500ML / Şişe	
DIŞ KOLİ:	16 Şişe / Koli	29,5CM x 29,5CM x 23CM
PALET:	36 Koli / Palet	80CM x 20CM x 195CM

Ref: MCBF001

Barkod: 8683148050575

Sınıf: Kozmetik

Miktar: 400ml

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	EBATLAR
PAKET:	400ML / Şişe	
DIŞ KOLİ:	12 Şişe / Koli	26,5CM x 21,5CM x 21,5CM
PALET:	126 Koli / Palet	80CM x 20CM x 19,5CM

MED-COVER
comfortably recover!



PİŞİK ÖNLEYİCİ BEBEK MENDİLİ

Yenidoğan bebeklerin hassas cildinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen Med-Cover Pişik Önleyici Bebek Mendili, içerisinde bulunan Dimetikon sayesinde cilt bariyerini güçlendirir, cilt üzerinde şeffaf ve nefes alabilen bariyer oluştururken; cildi yatıştırır, korur, meydana gelmiş olan pişğin giderilmesinde, doğal onarım sürecine yardımcı olur. Hücre yenilenmesini aktive ederek, yenilenmeyi destekler ve hızlandırır.

İçerisinde bulunan doğal ekstraktlar ve vitaminler sayesinde cildi nemlendirir, kaşıntıyı önler, antioksidan etki gösterir ve cildi yumuşatır.

medoffice®

Ref: MC0070

Barkod: 8681020477700

Sınıf: Kozmetik

Miktar: 50 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
NONWOVEN:	50 GSM (50% VISCON +50% PES) BEYAZ SPUNLACE
DIKİŞ:	Z FOLD
PAKETLEME:	FlowPack, 60 PE + 12 PET
BİTMİŞ ÖLÇÜLER:	20cm x 20cm

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	EBATLAR
PAKET:	50 Adet / Paket	
KOLİ:	30 Paket / Koli	39CM x 39CM x 30CM
PALET:	36 Koli / Palet	80CM x 120CM x 195CM

AYAK BAKIM KREMI

Ayak bakımı ve ayak koruması için hazırlanmıştır. Kuru, çatlaklı topuklar ve sert ayaklarda etkili koruma ve nemlendirme sağlar. Bitkisel yağlar ve vitaminlerin etkili kombinasyonu ile ayak derisini yumuşatır, çatlakların önlenmesine ve sert topukların onarılmasına yardımcı olur. Tip 1 ve Tip 2 diyabetli hastalarda 'Kserozis' olarak bilinen kuru ayaklar, otonom nöropatiye, terleme üretiminde bozulmaya, periferik (çevresel) kızamığa, ödem atrofisine ve gelecekte kuru cildin daha da kötüleşmesine neden olur. Kuru cilt, tedavi edilmezse ülserasyon riski olan çatlaklar geliştirebilir. Ayrıca ayak artan basınç ve sürtünmeye maruz kaldığında ayak ülseri gelişme riski artar. 'Diyabetik Ülserasyon'u önlemek önemlidir, çünkü bunlar sadece önemli rahatsızlık ve sorunlara neden olmazlar, aynı zamanda en önemli sonuç olarak amputasyona da yol açarlar. Nasır ve çatlaklar arttığında ülserasyon oluşur. Diyabetik ayağın ihtiyacına göre formüle edilmiş bir nemlendirici kremin düzenli kullanımı bu durumun önüne geçebilir. Bu nedenle Med-Cover Ayak Bakımı diyabetik ayak bakımı için önemli bir destekleyici üründür.



Ref: MCFC001

Barkod: 8681020477946

Sınıf: Kozmetik

Miktar: 200ml

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	EBATLAR
PAKET:	200ml / Şişe	
DIŞ KOLİ:	20 Şişe / Koli	29,5CM x 29,5CM x 23CM
PALET:	75 Koli / Palet	80CM x 20CM x 195CM




// Cilt yüzeyinde bulunan bakteriler için, klinik olarak kanıtlanmış çözüm //



**ENFEKSİYON
ÖNLEYEN
ÜRÜNLER**

ENFEKSİYON ÖNLEYEN ÜRÜNLER

FORMÜLASYON

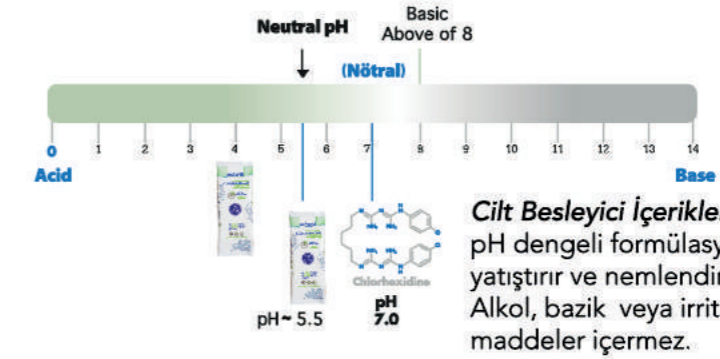

ETKİNLİK

- Ciltte homojen bir CHG dozu sağlar.
- Durulama gerektirmeyen formülü ile uygulamadan 6 saat sonra bile antimikrobiyal aktivite sağlar.
- Çok çeşitli mikroorganizmalara karşı hızlı ve etkilidir.

KAZANIMLAR

- 22 Kanıtlanmış Etki,
- 22 Adet Yayınlanmış Bilimsel Çalışma.



ANTİBAKTERİYEL VÜCUT TEMİZLEME HAVLUSU

MEDİSEPTİK Antibakteriyel Perine Bölgesi Temizleme Havlusu, İnkontinans problemi olan hastalarda ve hasta alt bezi kullanan hastalarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu tür bireylerde idrar ve gaitada bulunan e-coli bakterisi gibi bakteriler, ciddi cilt hasarının yanısıra idrar yolları enfeksiyonuna sebep olabilmektedir.

Mediseptik içeriğindeki 'Klorheksidin' ile mukozal bölge ve ciltte herhangi bir hasar oluşturmadan bu tür zararlı bakterileri %99.99 oranında yok eder. Petekli dokusu ile bölgedeki gaitayı kolayca temizler. Yumuşak dokusu ile hassas ciltlerde konforlu bir kullanım sunar. Kuruyup çatlamış bölgenin onarılmasına yardımcı olur. Cildin pH dengesini düzenleyerek, sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Hasta alt bezi kullanan hastalarda her alt bezi değişiminden sonra kullanılması gerekmektedir.

Ref: MAB0030

Barkod: 8683148050308

Sınıf: Biyosidal

Miktar: 12 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
NONWOVEN:	60 GSM (50% VISCON + 50% PES) BEYAZ SPUNLACE
KATLAMA:	Z Katlama
PAKETLEME:	FlowPack, 60 PE + 12 PET

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	EBATLAR
PAKET:	12 Adet / Paket	
KOLİ:	100 Paket / Koli	39CM x 39CM x 30CM
PALET:	36 Koli / Palet	80CM x 120CM x 195CM

ANTİBAKTERİYEL PERİNE BÖLGESİ TEMİZLEME MENDİLİ

MEDİSEPTİK Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusu içeriğindeki 'Klorheksidin' ile gram negatif ve gram pozitif bakteriler üzerinde %99.99 etkilidir. Yatalak hastalarda, yoğun bakım hastalarında, hareket kabiliyeti kısıtlı hastalarda, günlük vücut temizliği için kullanılabilir.

Ameliyat öncesi ve sonrası hasta vücudunu çevresel enfeksiyonlardan korumak amacıyla kullanılabilir. Zengin içeriği ile temizlik etkisinin yanı sıra profesyonel bir cilt bakım imkanı sunar.

Yumuşak bez dokusu ve cilt dostu pH derecesi ile sık kullanıma uygundur. Diğer temizleme ürünlerinden farklı olarak cildi kurutmaz, aksine cildi besler ve elastikiyet kazandırır.



Ref: MAB0040

Barkod: 8683148050230

Sınıf: Biyosidal

Miktar: 25 adet/paket

Ref: MAB0040-1

Barkod: 8683148050254

Sınıf: Biyosidal

Miktar: 50 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
NONWOVEN:	50 GSM (50% VISCON + 50% PES) BEYAZ SPUNLACE
KATLAMA:	Z Katlama
PAKETLEME:	FlowPack, 60 PE + 12 PET

PAKET DETAYLARI	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	EBATLAR
PAKET:	50 Adet / Paket - 25 Adet / Paket	
KOLİ:	30 Paket / Koli - 60 Paket / Koli	39CM x 39CM x 30CM
PALET:	36 Koli / Palet	80CM x 120CM x 195CM



ANTİBAKTERİYEL SAÇ TEMİZLEME BONESİ

Mediseptik Antibakteriyel Saç Temizleme Bonesi yatalak hastalar, hareket kabiliyeti kısıtlı hastalar, yoğun bakım hastaları gibi özel ihtiyaç sahibi hastaların saç ve baş bölgesi temizliğini yapmak için tasarlanmıştır. Kullanıma hazır formda olup, durulama gerektirmez. Antibakteriyel etkisi ile çevresel bakterilerin sebep olacağı enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Kullanılan özel kumaş ile son derecede nazik bir deneyim sunar. İçeriğindeki bileşenler ile kafa derisindeki ölü hücreleri uzaklaştırır ve cildin nefes almasını sağlar. Provitamin B5 ve E Vitamini ile saç ve saç derisini besler. Lateks içermeyen özel lastiği ile ciltte irritasyona sebep olmaz. 5 dakika içerisinde saç ve saç derisi bakımını gerçekleştirir.

Ref: MAB0010

Barkod: 8683148050438

Sınıf: Biyosidal

Miktar: 1 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA	
NONWOVEN:	120 GSM (30% VISCON +70% PES) BEYAZ SPUNLACE	
OUTER NONWOVEN:	PE Film 40GSM Beyaz - Sıvı Geçirmez	
LASTİK:	Lateks içermeyen şeffaf lastik, 300 mic. X 6mm	
PAKETLEME:	Doypack Ambalaj, 60 PE + 12 PET	
BİTMİŞ ÖLÇÜLERİ:	Açık Boyut: 50-53 cm diameter cut size	
	Bitmiş Ürün:	Açıklık: 13-16cm çap
		Çap: 26-28cm çap

PAKET İÇERİĞİ	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	AĞIRLIK	ÖLÇÜLER
PAKET:	1 Saç Yıkama Bonesi / Paket	0,130 KG	50CM DIAMETER
KOLİ:	75 Paket / 1 Koli	10,25 KG	39CM x 39CM x 30CM
PALET:	36 Koli / 1 Palet	385 KG	80CM x 120CM x 195CM

ANTİBAKTERİYEL VÜCUT TEMİZLEME KESESİ

Mediseptik Antibakteriyel Vücut Temizleme Kesesi, ele giyilebilir kese formundaki yapısından dolayı son derece etkili ve kolay bir bakım imkanı sunar. Petekli dokusu ile büyük kalıntıları bile kolayca vücuttan uzaklaştırır. 85 GSM kalınlığındaki yumuşak bez yapısı ile mendillerden daha fazla solüsyon taşır. Bir paket Vücut Yıkama Kesesi ile bir kişinin tüm vücut bakımı sağlanabilir. Su ve Sabun kullanılan temizlik işlemlerindeki gibi cildi kurutmaz. Cilde elastikiyet kazandırır ve cildin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur. Geleneksel yıkama yöntemlerine göre çok daha kısa sürede vücut temizliği yapılmasını sağlar.



Ref: MAB0020-4

Barkod: 8683148050391

Sınıf: Biyosidal

Miktar: 8 adet/paket

Ref: MAB0020

Barkod: 8683148050407

Sınıf: Biyosidal

Miktar: 10 adet/paket

ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
NONWOVEN:	85 GSM (30% VISCON + 70% PES) BEYAZ PETEKLİ SPUNLACE
DİKİŞ:	ULTRASONIC
PAKETLEME:	Zipli Ambalaj, 60 PE + 12 PET
BİTMİŞ ÖLÇÜLER:	15cm x 22cm

PAKET İÇERİĞİ	PAKET / KOLİ / PALET MİKTARI
PAKET:	8 Adet / Paket
KOLİ:	70 Paket / Koli
PALET:	36 Koli / Palet

HICLO

Hiclo, Hipokloröz Asit'in bilimsel formülüdür. HOCl, bakteri ve virüslere karşı savaşmak, vücudu korumak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz kan hücreleri tarafından doğal olarak üretilir.

HOCl, Gram negatif / pozitif bakterilere, spor, mantar ve virüslere karşı güçlü bir dezenfektandır.

Canlıda kullanılabilen tek dezenfektandır. Çünkü HOCl insan vücudunun savunma sisteminin, bakteri ve virüslere karşı kendisinin ürettiği, doğadaki patojen mikroorganizmalara karşı en etkin fizyolojik bir moleküldür.

Ne İşe Yarar?

Vücudumuzda bulunan akyuvar adı verilen hücreler, bakteri ve virüslere karşı mücadele ederken Hipokloröz Asit (HOCl) adı verilen fizyolojik bir madde üretir. Bu madde doğada bilinen en geniş ve etkili spektrumu olan biosittir. Zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici özelliği ve insan sağlığına zararı yoktur. Dolayısıyla doğada bilinen en iyi antiviral ve antibakteriyel dezenfektandır.

FARKLI ML SEÇENEKLERİ DE MEVCUTTUR.

- Travmatik yaralar
- Operasyon sonrası yaraları
- Kronik deri ülserleri (venöz, diyabetik ve basınç ülserleri vs.)
- 1. ve 2. derece yanıklar gibi akut ve kronik yaralarda enfeksiyonların önlenmesi için kullanılır.

Yeni Ürün

NOT: Serum formu ile yara üzerine damla şeklinde uygulanması ile yaranın sürekli nemli kalmasını ve hastane ortamında enfeksiyona sebep olabilecek zararlı mikroorganizmaların yaraya nüfuzunu önleyerek iyileşme sürecini hızlandırır.

NOT: HICLO'nun diğer dezenfektanlara göre;

- Doğal
- Geniş bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bu avantajlarından dolayı medikal kullanım alanları oldukça artmış ve çeşitlenmiştir.



El ve Cilt Dezenfektanı

Günlük hayatınızın ihtiyaç duyduğunuz her anında kullanabileceğiniz alkol ve kimyasal içermeyen güçlü etkili ve doğal bir dezenfektandır.

Gün içerisinde ihtiyaç duyulduğu kadar uygulanabilmektedir ağrı, acı ya da yanma hissi oluşturmaz. Herhangi bir kalıntı ve kötü koku bırakmaz. Cildin doğa pH değerine uygun olduğu için ciltte tahrişe sebebiyet vermez.

Cilt üzerine 60 saniye ovularak uygulanması ile hızlı bir şekilde dezenfeksiyon sağlar ve durulama gerektirmez. Doğal içeriği sayesinde canlıya ve çevreye zarar vermez.

Antibakteriyel Durulama Gerektirmeyen Yıkama Solüsyonu

Yara enfeksiyonları, hastanın cerrahi bölgesindeki mikroorganizmaların birikmesinden ve çoğalmasından kaynaklanır. Mikroorganizmaların yara yatağına girmesinin çok sayıda yolu vardır. Bakteriler kan akışına girdiklerinde enfeksiyon sepsise neden olabilir.

Etkin bir şekilde tedavi edilmediği takdirde, sepsis potansiyel olarak ölümlü sonuçlanan çoklu organ yetmezliklerine dönüşebilir. HICLO YARA YIKAMA SOLÜSYONU'NU yara üzerindeki ve çevresindeki canlı organizma yükünü azaltarak yara iyileşmesini hızlandırır. Aynı zamanda oluşabilecek enfeksiyonları önler.

Kontamine olmuş biyofilmin oluşumunu önler ve yok eder. İyileşme süresini kısaltır.

İyot, Alkol, Fenol, Aldehit gibi zararlı hiçbir kimyasal ve ağır metaller içermez.

Cilt pH'ı ile uyumludur. Yara bölgesinde iritasyon ve alerjik reaksiyon göstermez.

Akut ve kronik yara bölgesi, ameliyat sonrası yaralar, yanıklar, küçük yırtıklar ve kesiklerde hasarlı bölgeler için geliştirilmiş bakım ve temizleme solüsyonudur.

Canlı dokuya ve çevreye zarar vermez.

Uygulama sonrası durulama gerektirmez.

BAKTERİLER

Gram Negatif-Gram Pozitif Aerob ve Anaerob Bakteriler

Corynebacterium amycolatum	Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter aerogenes	Serratia marcescens
Actinomcesler	Mycoplasmalar
Chlamidialar	Rhizobialar
Bacteriodesler	Pasteurella pneumotropica
Acinetobacter baumannii	Salmonella enteritidis
Bordetella bronchiseptica	Salmonella paratyphi A
Citrobacter freundii	Salmonella typhi
Corynebacterium kutscheri	Shigella flexneri
Enterococcus faecium	Bacilluslar (sporu ve sporsuz formlara)
Escherichia coli	Clostridiumlar (sporu ve sporsuz)

MANTARLAR

Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Candida Albicans
Microsporium
Epidermophyton floccosum
Rhizopus oryzae
Trichophyton rubrum
Trichopyton tonsurans
Trichophyton verrucosum

Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Micrococcus luteus
Mycobacteriumlar
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis

Klebsiella oxytoca
Listonella anguillarum
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis
Chryseobacterium
Meningosepticum
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Staphylococcus saprophyticus
Stenotrophomonas maltophilia
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

VİRÜSLER

Zarflı ve Zarfsız Virüsler

Corona viridae: Corona virüs suşları
Adenoviridae: Adenovirus
Picornoviridae: Coxsackievirus
Herpesviridae: Epstein-Barr virus, Herpes simplex tip 1, 2 ve 8, Cytomegalovirus, Varicella Zoster
Hepadnaviridae: Hepatitis B virus
Flaviviridae: Hepatitis C virüs
Retroviridae: HIV
Orthomyxoviridae: Influenza virüs

Paramyxoviridae: Mumps, Measles
Respiratory Syncytial virus (Hrsv)
Papoviridae: Papillomavirus
Rhabdoviridae: Rotovirus
Togoviridae: Rubella Virus
Reoviridae: Rota Virus
Poliovirus
Parainfluenza
Hepatitis A virüs

PARAZİTLER

Acanthamoeba spp.
Trichomonas vaginalis

YARA YIKAMA SOLÜSYONU

Yara Yıkama Solüsyonu birinci ve ikinci derece yanıkların yanı sıra akut, kronik ve kontamine yaraların temizlenmesi, nemlendirilmesi, durulanması için kullanılan yıkama solüsyonudur. Hipokloröz asit (HOCl) güvenli koruma sağlar ve Med-Cover'ı güvenilir bir yara irigasyon çözümü haline getirir.

Kullanım Alanları

- ✓ Diyabetik ayak ülseri, bası ülseri, venöz bacak ülseri vb. gibi herhangi bir derinlikteki tüm kronik yaralar,
- ✓ Tüm akut yaralar, kesikler, ısırık yaraları, yırtılmalar, sıyrıklar, Ameliyat yaraları (intraoperatif ve postoperatif),
- ✓ Kıkırdak, tendon, bağ ve/veya kemiklerdeki yaralar,
- ✓ İkinci dereceye kadar yanık,
- ✓ Radyasyon ülseri,
- ✓ Fistüller ve apseler,
- ✓ Kulak, burun, boğaz gibi boşluklar,
- ✓ Kritik kolonize yaralar,
- ✓ Yumuşak doku yaralanmaları,
- ✓ Med-Cover Yara Yıkama Solüsyonu ayrıca yara pansumanını nemlendirmek ve kabuklaşmış yara pansumanlarını gevşetmek için de kullanılabilir.

- **Vücutta doğal olarak bulunan HOCl'den oluşur.**
- **Yarayı mekanik olarak temizler.**
- **Sitotoksik veya tahriş edici değildir.**
- **Ağır metal içermez.**
- **Ph'ı yarayla uyumludur.**
- **Yarada kötü kokuyu azaltır.**

Yeni
Ürün



A Safe Saç Yıkama Banesi, hareket kabiliyeti kısıtlı, yatalak ve yoğun bakım hastaları gibi özel ihtiyaçları olan yıkanamayan hastaların saç ve baş bölgesi için temizlik ve bakım sağlar. Saç ve saç derisini yağlandırmaz, besler ve canlılık verir.

YENİ
ÜRÜN



Durulama ve
kurulama
gerektirmez!

Tüm vücutta
kullanıma
uygundur!

Koruma, hijyen ve
bakım tek üründe!

Alkol içermez!

31

YENİ
ÜRÜN



A Safe Kapaklı Perine ve Vücut Temizleme Havlusu, duş alınamayan durumlarda tüm vücudu temizlemek için tasarlanmıştır. Kullanıma hazır olarak paketlenmiş A Safe Perine ve Vücut Temizleme Havlusu; cildi temizler, nemledir, besler ve korur. Cilt pH'ı ile uyumludur. Alkol içermez, ekstra durulama ve kurulama gerektirmez. Zengin içeriği ile daha sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Perine ve diğer bölgelerdeki kötü koku oluşumunu engelleyici ve giderici özelliğe sahiptir. Kullanıldıktan sonra ferah ve temiz bir his bırakır.

Ergonomik Hava Almaz Kapak

32

AYARLANABİLİR İLK YARDIM BOYUNLUĞU

MED-COVER Ayarlanabilir İlk Yardım Boyunluğu, taşıma sırasında politravmatik bir hasta için Servikal Rachis'in sıkışmasını önlemek için gereklidir.

Parmaklarla basit ve hassas bir ölçüm yöntemi sayesinde ideal bir boyut seçimi sunar.

Röntgen uyumlu, ayarlanabilir açma-kapamalıdır. Tek parça tasarımı ile, alanın sınırlı olduğu yerlerde verimli depolama sağlar.

Servikal bölge anatomisine ve ilk yardım prensiplerine uygun olarak üretilen Med-Cover ayarlı ilk yardım boyunlukları, boyunda tam stabilizasyonu sağlayarak, boyun kısmının ekstansiyon, fleksiyon, iç ve dış rotasyon hareketlerini önlemektedir.



- Yetişkin Boy (16 kademe),
- Pediatrik Boy (12 kademe),
- Geniş çene desteği,
- Konforlu yumuşak sünger,
- Elastik materyal.

Ref: MCI0
Ref: MCS0

Barkod: 8681020477472
Barkod: 8681020477458

Sınıf: Tıbbi Cihaz
Sınıf: Tıbbi Cihaz

Boyut: Yetişkin
Boyut: Pediatrik

PAKET İÇERİĞİ	PAKET/KOLİ/PALET MİKTARI	EBATLAR
PAKET:	1 Adet /Paket	
DIŞ KOLİ:	Yetişkin: 50 Adet / Koli - Pediatrik: 85 Adet / Koli	58CM x 36CM x 45CM
PALET:	16 Koli / Palet	80CM x 20CM x 195CM

KULLANIM AMACI:

Bu ürün, diğer servikal ve tam vücut immobilizasyon cihazları (CSID'ler ve FBSID'ler) ile birlikte, taşımayı sağlayan nötr bir pozisyonda servikal omurgayı desteklemek için tasarlanmıştır. Ek oksijen hatlarını sabitlemek için kanal kancası mevcuttur.



Önemli


- Şüpheli bir omurilik yaralanması durumunda, uygun boyun immobilizasyonu toplam immobilizasyonun sadece bir parçasıdır.
- Omurganın herhangi bir hareketini önlemek için hastanın uygun şekilde hareketsiz hale getirilmesi zorunludur.

Uyarılar:

- Med-Cover ilk yardım boyunluğu sadece kalifiye sağlık hizmeti sağlayıcılar tarafından kullanılmalıdır.
- Yanlış kullanımı yaralanmaya veya kalıcı sakatlığa neden olabilir.
- Daima yerel spinal immobilizasyon protokolünü takip edin.
- Doğru boyutta boyunluk kullanın. Büyük boy bir boyunluk, hastanın servikal omurgasını aşırı derecede uzatır. Küçük boyutlu bir boyunluk uygun stabilite sağlamayabilir.

Kullanım Talimatları:


- Hastanın boyun kısmını ölçün.

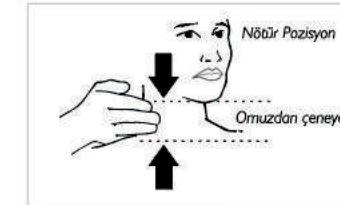



Yerel protokol tarafından aksi belirtilmedikçe, başı nötr veya "gözler ileri" konumunda hizalayın.

- Boyunluğu hastaya göre ayarlayın.


Yetişkin : 4 pozisyondan birini seçin.
Pediatrik: 3 pozisyondan birini seçin.

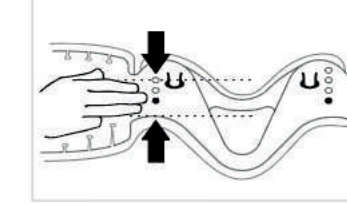

- Ayarlayın ve kilitleyin.

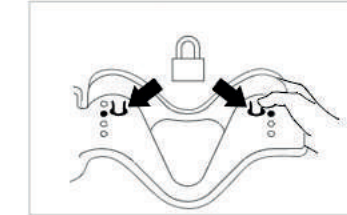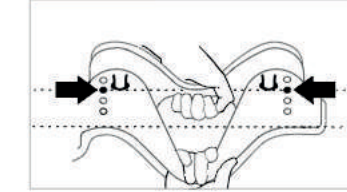

- Yakayı katlayın.

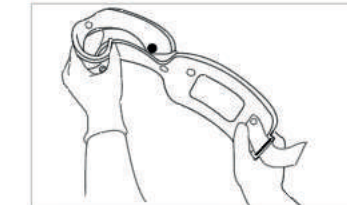

- Nötr baş pozisyonunu manuel olarak korurken boyunluk uygulayın.



- Çene desteğini çenenin altına yerleştirin. Farklı bir boyut gerekiyorsa, yakayı çıkarın, yeniden boyutlandırın ve yeniden uygulayın.



- Ön kısmı yerinde tutarken boyunluğun arkasını çekin ve ardından sıkın.



- Sırtüstü yatan bir hasta için, çene desteğini yerleştirmeden önce arka paneli boyun arkasına kaydırın.

Teknik
Özellikler

Depolama şekli;
Katlanmış bir şekilde saklamayınız!
Yatay şekilde depolayınız.

Depolama Sıcaklık Aralığı:
-34 °C / 52 °C
(-30° F - 125° F)

Uygulama Sıcaklık Aralığı:
-25 °C / 48 °C
(-13° F - 115° F)

MEDOFFICE ANAHTAR TESLİM ÖZEL MARKALI ÜRETİM
(PRIVATE LABEL)

Medoffice, kendi markanız için size 75 ülkede milyonlarca kullanıcı deneyimi sunuyor.

Tıbbi Cihaz, Biyosidal ve Kozmetik sınıflarında ürettiğimiz ürünler 75 ülkede tescillidir ve her yıl milyonlarca kişi tarafından güvenle kullanılmaktadır.

Her ülkenin kendi yönetmeliği vardır ve Medoffice hepsine uygun ürünler üretir. Ürünlerimiz CE, FDA, TGA, ISO, KFFDA, SFDA, ANVISA gibi birçok kurum tarafından onaylanmıştır.

Üretime başladığımız günden bu yana satılan milyonlarca paket ürünün geri bildirimi sayesinde ürünlerimizi en üst seviyeye taşıdık. Cilt tipleri, saç tipleri, kullanım alışkanlıkları, sıcaklıklar, satış kanalları ve Ülkelerdeki hastane ihtiyaçları gibi birçok faktör ürünlerimizi en üst kalite seviyesine getirmemize yardımcı olmuştur. Medoffice şu anda birçok küresel şirketin ana tedarikçisidir.

Global şirketler markalarını bize emanet ediyor, çünkü bize güvenmek için çok sebepleri var. Medoffice, yaşayan bir kalite yönetim sistemine sahiptir. Üretilen her ürünü takip etmek mümkündür. Medoffice, her yıl birçok denetim kuruluşu tarafından kalite ve etik denetimlerinden geçmektedir.

Medoffice olarak markanıza değer katmayı ve en iyinin parçası olmayı sizlere sunuyoruz.

Medoffice, İngiliz GHP tarafından 3 yıl üst üste "En İyi Yatan Hasta Bakım Ürünleri Üreticisi" ödülünü almıştır.



Best Inpatient Care Products Manufacturer 2020




Markanızda Medoffice kalitesinde bir ürüne sahip olmanıza sadece 10 Adım kaldı.

	<i>Bir ürün fikrim var, Medoffice benim için tasarlasın.</i>	<i>Medoffice ürünlerini kendi markamla istiyorum.</i>	<i>Medoffice'in daha önce satmış olduğum bir ürünü üretmesini istiyorum.</i>	<i>Medoffice'in markanız için size bir ürün önermesine izin verin.</i>
1	<i>Tüm seçenekler, Medoffice ile şirketiniz arasında bir 'Gizlilik Sözleşmesi' imzalayarak başlar.</i>			
2	Ürün fikrinizi, ürünün kullanım amacını ve temel özelliklerini tanımlamanız istenir.	İlgilediğiniz ürün için değişmesi gereken özellikler varsa değerlendirilir.	Güncel ürün özellikleri ve güncel ürün numunesi talep edilir.	Halihazırda satmakta olduğunuz ürün grubunuz hakkında bilgi talep edilir.
3	Bu ürünlerin mevcut makine parkuru ile üretilip üretilmeyeceği teknik ekibimiz tarafından belirlenir. Mümkünse yaklaşık maliyet çıkarılır.	Ürün, pazarınıza özel hale getirilir. (boyutlar, paket miktar, paket tipi vb.)	Teknik ekip formülasyon için çalışır ve sizin için bir numune hazırlanır.	Anlık çalışmakta olduğunuz ürün pazarı hakkında bilgi istenir.
4	Ön numune gönderilir, onayınıza istinaden sipariş ödemesi talep edilir.	Taleplerinize göre ürün numunesi tarafınıza gönderilir.	Ambalaj türü belirlenir.	Pazarınıza ve ürün grubunuza göre tecrübelerimize dayanarak size ürünler önerilir.
5	Onaylanmış numunenize dayalı nihai formülasyon tarafınıza gönderilir.	Onayınıza istinaden sipariş talep edilir.	Numune gönderilir. Onayınıza istinaden sipariş talep edilir.	Katalog veya broşürlerimize göre değerlendirme yapıldıktan sonra numune gönderilir.
6	Onayınızdan sonra gerekli testler yapılabilir ve teknik dokümanlar hazırlanabilir.	Talepleriniz doğrultusunda Artwork (Ambalaj tasarımı) yapılır.	Mevcut ambalaj tasarımını talep edilir.	Onayınıza istinaden sipariş talep edilir.
7	Ambalaj tasarımınız için bıçak izleri hazırlanır.	Ambalaj tasarımının ardından gerekli teknik dokümantasyon gönderilir.	Gerekli teknik dokümanlar gönderilir.	Markanıza ve pazarınıza özel ambalaj tasarımları hazırlanır.
8	Talepleriniz doğrultusunda Artwork (Ambalaj tasarımı) hazırlanır.	Orijinal ambalajlı numuneler gönderilir.	Orijinal ambalajlı numuneler tarafınıza gönderilir.	Gerekli Teknik dokümanlar hazırlanır.
9	Ambalaj tasarımı hazırlanır.	Ambalaj tasarımı hazırlanır.	Ambalaj tasarımı hazırlanır.	Ambalaj tasarımı hazırlanır.
10	Tebrikler! Fikriniz ürüne dönüştü.	Onay alındıktan sonra seri üretim başlar.	Onay alındıktan sonra seri üretim başlar.	Onay alındıktan sonra seri üretim başlar.



MEDOFFICE ÜRETİM HATLARI (KAPASİTE OLARAK)

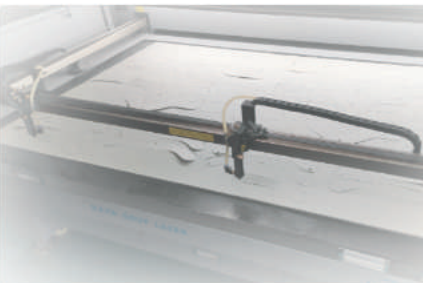

ISLAK HAVLU ÜRETİM HATTI-1
100.000 PAKET / GÜNLÜK

ISLAK HAVLU ÜRETİM HATTI-2
30.000 PAKET / GÜNLÜK

KESE ÜRETİM HATTI - 10'lu
25.000 PAKET / GÜNLÜK

SAÇ YIKAMA BONESİ ÜRETİM HATTI
35.000 PAKET / GÜNLÜK

KREM ÜRETİM HATTI
10.000 TÜP / GÜNLÜK

KÖPÜK, JEL, SIVI ÜRETİM HATTI
50.000 PAKET / GÜNLÜK

BOYUNLUK ÜRETİM HATTI
10.000 PAKET / GÜNLÜK

SAÇ YIKAMA BONESİ DİKİM HATTI
45.000 PAKET / GÜNLÜK

MEDOFFICE ÜRETİM HATLARI (KAPASİTE OLARAK)

ISLAK MENDİL/ ISLAK HAVLU

Hasta Bakım Mendilleri, Medikal Islak Mendilleri, Bariyer Kremli Mendil, Bebek Mendili, Antibakteriyel Mendil, XL Islak Havlu, Makyaj Temizleme Mendili, Pet Bakım Mendili, Endüstriyel Mendil, Islak Tuvalet Mendilleri, Yüz Mendilleri, El Mendilleri, Vücut Yıkama Mendili, Egzersiz Sonrası Mendiller.



SAÇ YIKAMA BONESİ / VÜCUT YIKAMA KESESİ

Saç Yıkama Bonesi, Pediyatrik Boyunluk, Saç Yıkama Bonesi, Bit Tedavisi İçin Bit Bonesi, Vücut Yıkama Kesesi, Perine Bölgesi İçin Kесе, Bariyer Kremli Kесе, Pet Kesesi, Ultrasonik Dikişli Kuru Kесе, Overlok Dikişli Kuru Kесе.



KREM, JEL, DEZENFEKTAN, SIVI, KÖPÜK

Bariyer Krem, Bariyer Film Sprey, Ayak Bakım Kremi, Pişik Kremi, Vücut Temizleme Köpüğü, İntim Köpük, Antibakteriyel Durulama Gerektirmeyen Yıkama Solüsyonu, Antibakteriyel El ve Cilt Dezenfektanı, Yara Yıkama Solüsyonu, Temizlik ve Bakım Çözümü.



Medoffice olarak ürettiğimiz tüm ürünlerde önceliğimiz kalitedir. En iyi ürün ve hizmeti sunabilmek için yaşayan bir kalite yönetim sisteminin olması gerektiğine inanıyoruz. Üretilen tüm ürünler için hammadde tedarikçileri, kalite yönetim sistemi prosedürlerimize uygun olarak seçilir. Gelen her hammadde ve çıkan her bitmiş ürün için kalite kontrol yapılır.



Her yıl milyonlarca kişi tarafından kullanılan ürünlerimiz, alınan profesyonel geri bildirimler ile en üst seviyeye taşınmıştır. Kalite yönetim sistemimiz tüm geri bildirimleri derinlemesine analiz eder ve tüm kullanıcıları memnun etmek için en iyi ürün ve hizmeti sunar.



Tam donanımlı mikrobiyoloji laboratuvarlarında üretilen tüm ürünlerin kalite kontrol testleri düzenli olarak yapılmaktadır.



Medoffice fabrikası, kusursuz bir üretim alanı olmasının yanı sıra huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı olarak tasarlandı. En iyi ürünü üreten ve en iyi hizmeti veren kişilerin, en iyi yaşam alanına sahip bir işyerinde çalışması gerektiğini düşündük.

Medoffice fabrikası, ürettiği ürün grubu için ünlü mimar ve mühendisler tarafından tasarlandı.





Yazibaşı Mah. Kuşçu Caddesi No.9/1
35860, Torbalı İZMİR, TURKEY
Tel. +90 232 431 31 12
Fax. +90 232 431 31 09
info@medoffice.com.tr
www.medoffice.com.tr